
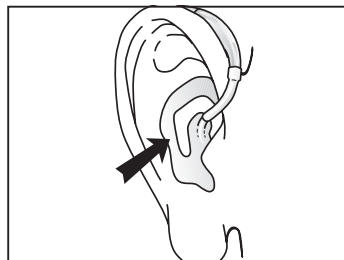
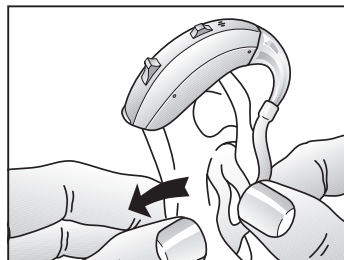


Поставяне и изваждане на шаблона за ухо

- 1 Хванете шаблона между палеца и показалеца. Поставете го, така че отворчето, от което излизане звука, да влезне в ушният ви канал.
- 2 С внимателно извъртане, плъзнете шаблона докрай в ухото.
- 3 Завъртете горната част на шаблона леко напред и назад, така че да се намести зад прегъвката на кожата над ушният ви канал.
- 4 Размърдайте шаблона нагоре и надолу и внимателно натиснете, за да се уверите, че е поставен правилно в ухото. Отварянето и затварянето на устата може да спомогне за по-лесното поставяне.
- 5 Уверете се, че слуховият апарат е тъкнат зад ухото.



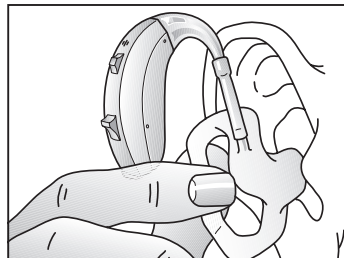


Като експериментирате, може да намерите по-лесен за вас начин за поставяне и изваждане на шаблона. При правилно поставяне, слуховият апарат ще пасне плътно, но удобно. Ако слуховият апарат предизвика раздразнение на ушите ви, свържете се с вашият специалист аудиолог.

Почистване на шаблона за ухо

- 1 Преди почистване, свалете шаблона и прикрепената към него тръбичка от слуховият апарат.
- 2 Почистете шаблона с помощта на мек сапун, и изплакнете с хладка вода.
- 3 След почистване, подсушете старателно шаблона. Изчистете тръбичката от нечистотии и остатъчни капки вода като използвате помпичка, телена примка или чрез енергично разклащане на шаблона, за да премахнете водата.

i С течение на времето, тръбичката може да се втвърди, обезцвети или да стане чуплива. Ако имате въпроси свързани с подмяната на тръбичката, свържете се с вашият специалист аудиолог.

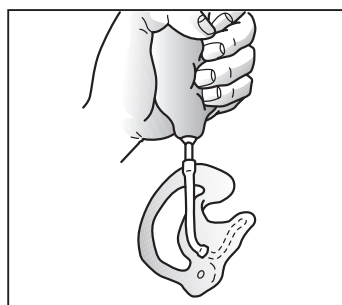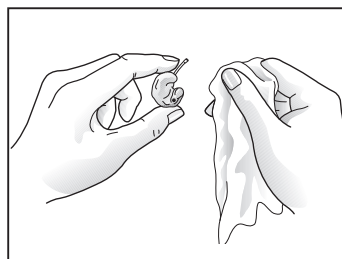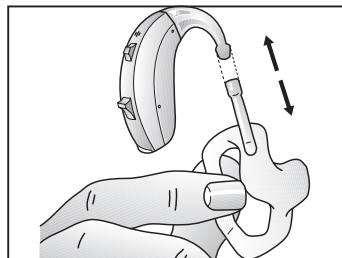

Данни за контакт на аудиолог: