
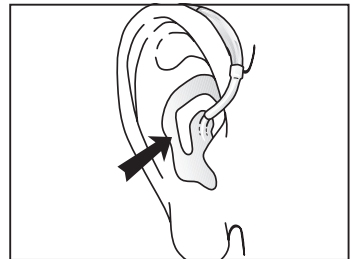
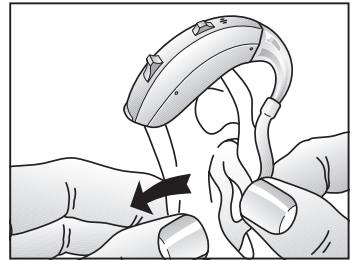


ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ

- 1 ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਪਹਲੀ ਉਗਲ ਦੇ ਵਚਿਕਾਰ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਕਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਸਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਚਿ ਟਕਿਓ।
- 2 ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਹਿੀ ਅਤੇ ਘਮਾਓਦਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਵਚਿ ਪਾਓ।
- 3 ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹੱਸਿ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਹਿਾ ਪਛਿਾਂਹ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਵਚਾ ਦੇ ਪਛਿ ਖੁਭ ਜਾਏ।
- 4 ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਹਿਾ ਦਬਾਓ ਕੀ ਇਹ ਕੰਨ ਵਚਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਚਿ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 5 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕੀ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਿਵਾਇਸ ਕੰਨ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਟਕਿਓ ਗਈ ਹੈ।



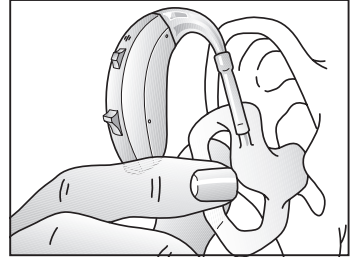


ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਵਚਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਿਵਾਇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਟਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਿਵਾਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨਾਂ ਵਚਿ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ(ਨਰਿੰਤਰ)

ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ

- 1 ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਟਾਊਬਰਿਗ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿਗ ਡਿਵਾਇਸਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।
 - 2 ਹਲਕਾ ਜਹਿ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲ ਲਵੋ।
 - 3 ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਏਅਰ ਬੱਲਬ, ਵਾਇਰ ਲੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਸਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਡੋ।
- i** ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਦੀ ਟਾਊਬਰਿਗ ਸਖਤ, ਭੁਰਭੁਰੀ ਜਾਂ ਰੰਗੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਊਬ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

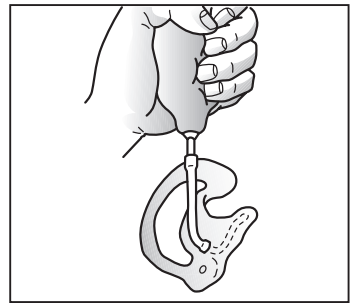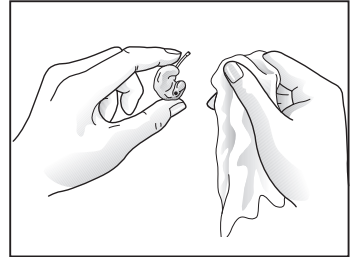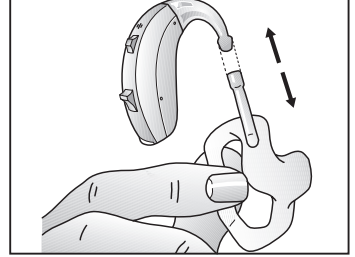

ਆਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ: