

# Програмен бутон

- Вашият слухов апарат може да има до 4 различни програми. Програмите могат да бъдат избрани чрез бутона, намиращ се в горната част, от задната страна на слуховия апарат.
- Натиснете бутона, за да промените програмата. Броят на звуковите сигнали (писукания), които ще чуете обозначава номерът на програмата, която сте избрали.

1 писукане = Програма 1

2 писукания = Програма 2 и т.н.

- Програмите се въртят на цикъл от 1 до 2 до 3 до 4, след това обратно до 1.
- Когато изключите слуховия апарат и го включите отново, винаги ще започне от Програма 1.



## Запишете вашите програми тук

	Име на програмата	Кога да я използвате
Програма 1		
Програма 2		
Програма 3		
Програма 4		

Вашият слухов апарат е настроен да писука, когато сменяте програмите.

Да  Не

Данни за контакт на аудиолог: