

程序按钮

- 您的助听器拥有多达 4 种不同的程序。可以使用助听器背面的顶部按钮来选择程序。
- 要更换程序，请按按钮。哔哔声响起的次数表示正在使用的程序。
 - 1 次哔哔声 = 程序 1
 - 2 次哔哔声 = 程序 2，以此类推
- 程序按照 1-2-3-4 的顺序循环，然后切换回 1。
- 关闭助听器并重新打开时，它将始终恢复为程序 1。



此处记录您的程序

	程序名称	使用时间
程序 1		
程序 2		
程序 3		
程序 4		

您的助听器已被设为在切换程序时发出哔哔声。

是 否

听觉矫正专家联系方式：