


Тънки тръби

Почистване на тънките тръби и куполи


- 1 Свалете тънките тръби от вашият слухов апарат преди почистване, като ги отвинтите в посока обратна на часовниковата стрелка.
- 2 Избършете тънките тръби и куполи с влажна кърпа.
- 3 За да се прочисти тънката тръба от влага и нечистотии, промушете черната жичка за почистване през тънката тръба, като започнете от противоположния край на купола.

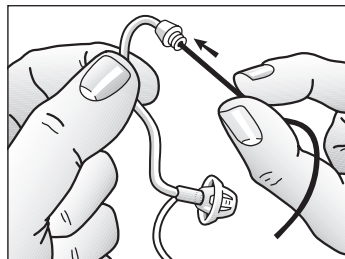

i Системите от тънки тръби и куполи трябва да се сменят, когато частите им започнат да се втвърдяват, станат чупливи или са прегънати.

Смяна на тънки тръби

- 1 Свалете тънките тръби от слуховия апарат като ги отвинтите в посока обратна на часовниковата стрелка.
- 2 Свържете резервната тънка тръба, като я завинтите в посока на часовниковата стрелка.

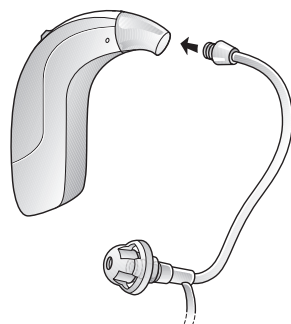

Смяна на куполите

Препоръчително е вашият личен слухопротезист да подмени купола, тъй като, ако куполът е поставен неправилно, той може да падне от ухото.

Данни за контакт на аудиолог: