

Włączanie/wyłączanie i wymiana baterii



Włączanie i wyłączanie

Włączanie aparatu słuchowego

Należy zamknąć całkowicie komorę baterii, aby włączyć aparat słuchowy.

Wyłączanie aparatu słuchowego



Należy otworzyć komorę baterii, aż wyczuwalne będzie kliknięcie, aby wyłączyć aparat słuchowy.

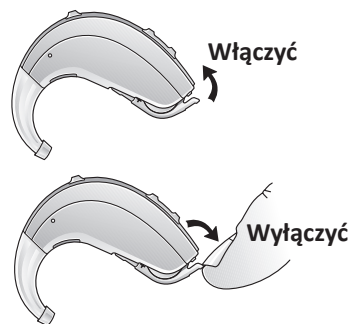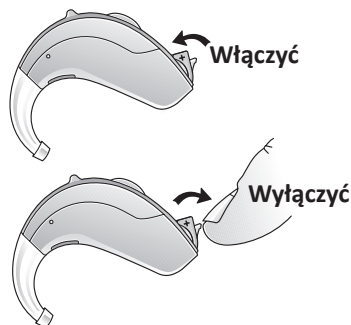

Wymiana baterii

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

- Aparat słuchowy wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski.
- Sygnał będzie powtarzany co 15 minut, dopóki aparat słuchowy nie wyłączy się automatycznie.

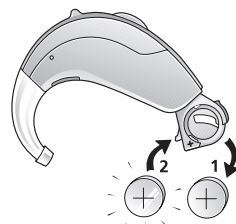
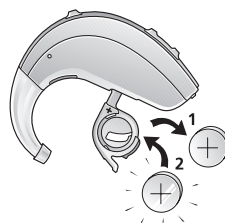


Włączanie/wyłączanie i wymiana baterii (ciąg dalszy)

Aby wymienić baterię

- Należy usunąć lepką etykietę z nowej baterii.
- Należy otworzyć komorę na baterie.
- Należy wyjąć zużyta baterię, pociągając ją do góry.
- Należy włożyć nową baterię na miejsce. Należy upewnić się, że płaska strona (oznaczona +) jest skierowana do góry.

i Aby zaoszczędzić baterię, należy upewnić się, że aparat słuchowy jest wyłączony, gdy nie jest używany.

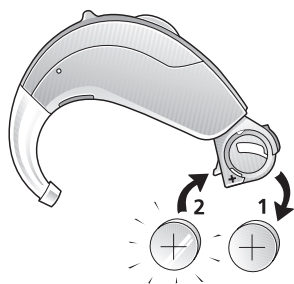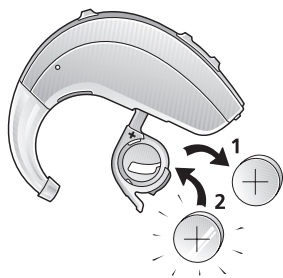

Twój aparat słuchowy został ustawiony tak, aby emitował sygnał dźwiękowy, gdy ustawiasz program

Tak Nie

Dane kontaktowe audiologa: