

ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੰਦ/ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ





ਬੰਦ/ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ



ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਲਕਿ ਮਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

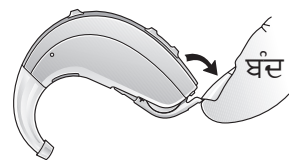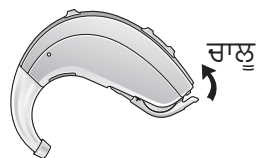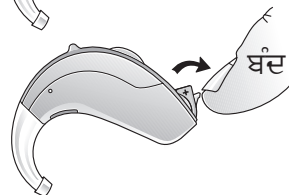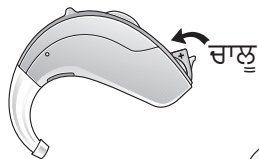

ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ

ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਏ

- ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਗਿਨਲ ਹਰ 15 ਮਿਨਿਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

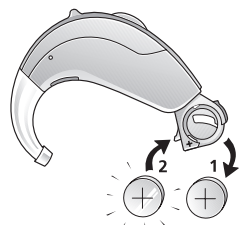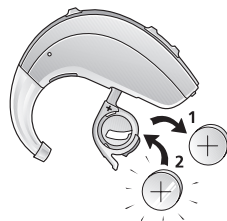

ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ (ਨਰਿੰਤਰ)



ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਿਪਕਾਉ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
- ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਖੱਬੇ ਕੇ ਹਟਾਓ।
- ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਮਤਲ ਪਾਸਾ (+ ਦਾ ਨਸ਼ਿਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ) ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

i ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

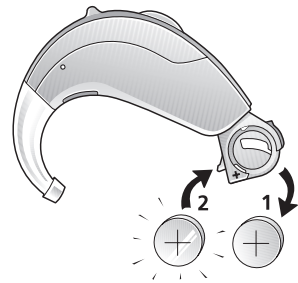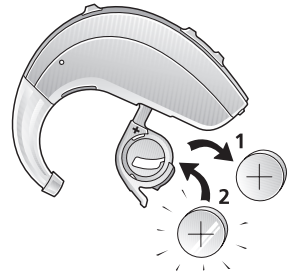

ਆਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ: