

# 音量控件 - 拨轮

音量控件位于助听器的背面，在电池仓的上方和程序按钮的下方。音量控件是一个拨轮，上面带有从 1 到 4 的数字标记。

**1 是最低音量，而 4 是最高音量。**

是最适合您的音量。

但在不同的收听情况下，您可能需要会对音量进行调节。

- **调低** 音量  
**向下** 转动拨轮
- **调高** 音量  
**向上** 转动拨轮

在达到最高和最低音量时，音量拨轮将停止。



听觉矫正专家联系方式：