

श्रवण लूप भनेको के हो?

श्रवण लूप (कहिलेकाहीं अडियो इन्डक्सन लूप पनि भनिन्छ) श्रवण यन्त्र भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने विशेष प्रकारको ध्वनि प्रणाली हो। श्रवण लूपले चुम्बकीय, वायरलेस सिग्नल प्रदान गर्दछ जुन श्रवण सहायकले 'T' (टेलिकोइल) सेटिङमा सेट गर्दा उठाउँछ।



श्रवण लूपमा बोलिएको शब्द उठाउन माइक्रोफोन हुन्छ; एउटा एम्पलीफायर जसले सिग्नललाई प्रशोधन गर्छ जुन त्यसपछि अन्तिम टुक्रा मार्फत पठाइन्छ; लूप केबल, बैठक कोठा, चर्च, सेवा काउन्टर आदि जस्ता विशिष्ट क्षेत्रको परिधि वरिपरि राखिएको तार जसले एन्टेनाको रूपमा काम गर्दछ जसले श्रवण सहायकमा चुम्बकीय संकेत विकिरण गर्दछ। व्यक्तिगत लूप प्रणालीहरू पनि उपलब्ध छन् (घाँटी वरिपरि फिट हुन्छ) र यसलाई MP3 प्लेयर, टिभी र केही ल्यान्डलाइन टेलिफोनहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ।

श्रवण लूप किन प्रयोग गर्ने?


- अनावश्यक पृष्ठभूमि आवाजलाई काट्छ
- रिसिभर/हेडसेट प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन
- ध्वनि सिधै श्रवण एडमा जान्छ
- उपयुक्त श्रवण सहायक भएको जो कोहीले पनि प्रयोग गर्न सक्छ
- जतिसुकै प्रयोगकर्ताहरूले प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छन्।

कृपया ध्यान दिनुहोस्: धेरैजसो श्रवण यन्त्रहरू लूप प्रणालीसँग उपयुक्त छन्; यद्यपि यो मानकको रूपमा सक्रिय गरिएको छैन। कृपया आफ्नो श्रव्यविद्लाई सक्रिय गर्न भन्नुहोस्।


इन्फ्रारेड प्रणालीहरू

इन्फ्रारेड प्रणालीहरू लूप प्रणालीहरूको विकल्प हुन्। तिनीहरूमा ट्रान्समिटर र रिसिभर (वा धेरै रिसिभरहरू) हुन्छन्। ट्रान्समिटरले रिसिभरमा सिग्नल पठाउँछ जसले यसलाई एक अडियो सिग्नलमा रूपान्तरण गर्दछ जुन हेडसेट वा घाँटीको लुपमा फिडिङ गरिन्छ।

पसल काउन्टर वा बैंकमा रहेको श्रवण लूपको रेखाचित्र तल दिइएको छ

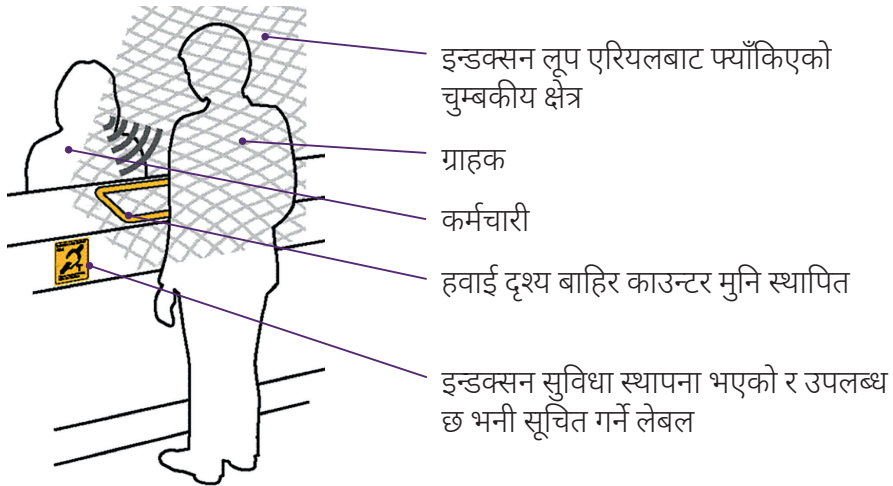

तल कोठा श्र(जस्तै

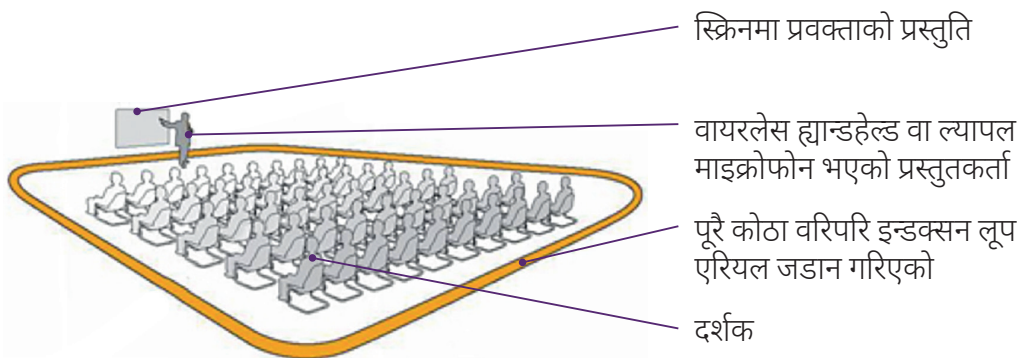

श्रवण लिङ्कबाट जानकारी र रेखाचित्रहरू - www.hearinglink.org मा उपलब्ध छ

NHS को लागि सही विकल्प

युके 02.09 D12.2019

danalogic GN