



स्लिम ट्यूबहरू घुसाउने र हटाउने


1. आफ्नो कानको माथिल्लो भागमा श्रवण सहायक झुण्ड्याएर सुरु गर्नुहोस्।

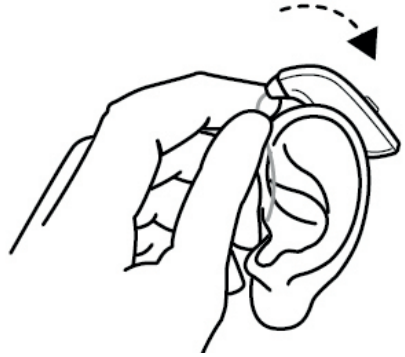

2. अर्को, ट्यूबलाई जहाँ झुन्डिन्छ त्यहाँ समात्नुहोस् र डोमलाई बिस्तारै आफ्नो कानको नहरमा धकेल्नुहोस्।

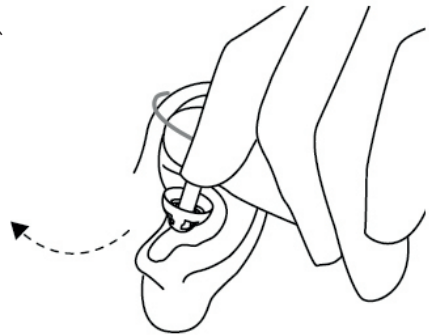

3. डोमलाई आफ्नो कानको क्यानलमा पर्याप्त टाढा धकेल्नुहोस् ताकि ट्यूब तपाईंको टाउकोको विरुद्धमा फ्लश हुन्छ।

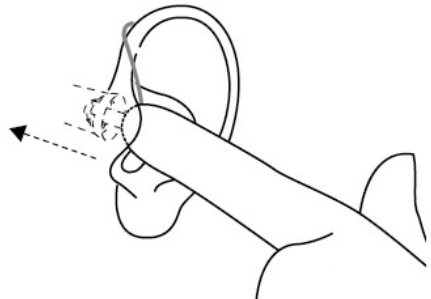


4. अन्तमा, प्रत्येक ट्यूबमा एक रिटेन्सन केबल छ जुन तपाईंको कानको कचौरामा राख्नु पर्छ।

स्लिम ट्यूबहरू घुसाउने र हटाउने (जारी)

5. श्रवण सहायक हटाउनको लागि, पहिले आफ्नो कानबाट श्रवण सहायक उठाउनुहोस्।



6. अर्को, ट्यूबलाई जहाँ झुन्डिन्छ त्यहाँ समात्नुहोस् र बिस्तारै आफ्नो कानको नहरबाट बाहिर निकाल्नुहोस्।

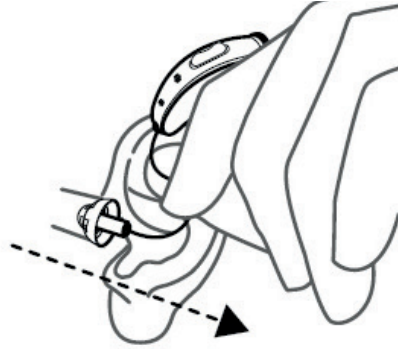

थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal