

कानको ढुवानी घुसाउने र हटाउने

इयरमोल्ड घुसाउन, यसलाई आफ्नो औंला र चोर औंलाको बीचमा राख्नुहोस् र ध्वनि आउटलेटलाई आफ्नो कानको नलीमा राख्नुहोस्।



हल्का घुमाउरो चालमा इयरमोल्डलाई आफ्नो कानमा पुरै स्लाइड गर्नुहोस्। इयरमोल्डको माथिल्लो भाग तपाईंको कानको नली माथि छालाको पट्टि पछाडि च्यापेको सुनिश्चित गर्नुहोस्।




इयरमोल्ड ठाउँमा भए पछि, श्रवण यन्त्रलाई अगाडि धकेल्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई आफ्नो कानको पछाडि आरामसँग बस्नको लागि पछाडि स्लाइड गर्नुहोस्।

केही मानिसहरूले ऐना प्रयोग गर्नाले इयरमोल्ड घुसाउन मद्दत गर्छ र एक पटक सही ठाउँमा राखे पछि यो चुस्त तर आरामसँग फिट हुनु पर्छ भन्ने पाउँछन्।

इयरमोल्ड घुसाउने र हटाउने (जारी)

इयरमोल्ड हटाउन, आफ्नो कानको पछाडिबाट श्रवण यन्त्र उठाउनुहोस् र यसलाई आफ्नो कानको छेउमा झुन्ड्याउन दिनुहोस्।

आफ्नो औंला र चोर औंला प्रयोग गरेर, कानको इयरमोल्डलाई बिस्तारै तान्नुहोस्। यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन तपाईंले इयरमोल्डलाई थोरै घुमाउन आवश्यक पर्न सक्छ।

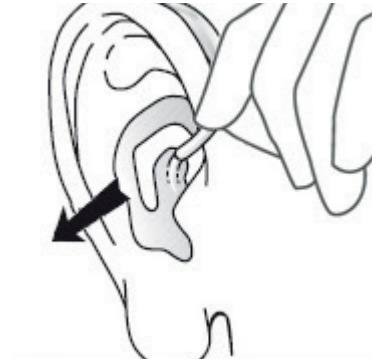

थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal