


कार्यक्रम बटन

- तपाईंको श्रवण यन्त्रमा 4 सम्म फरक कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्। कार्यक्रमहरू श्रवण यन्त्रको पछाडिको बटन प्रयोग गरेर चयन गर्न सकिन्छ। तपाईंले बटन कहाँ पाउनु हुनेछ भन्ने उदाहरण यहाँ छविमा देख्न सकिन्छ।
- कार्यक्रमहरू परिवर्तन गर्न, बटन थिच्नुहोस्। तपाईंले सुन्नु भएको बीपहरूको संख्याले तपाईं कुन कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भन्ने संकेत गर्छ।
 - 1 बीप = कार्यक्रम 1
 - 2 बीपहरू = कार्यक्रम 2, आदि।
- कार्यक्रमहरू संख्यात्मक क्रममा चक्र हुनेछन्। उदाहरणका लागि, कार्यक्रम 2 कार्यक्रम 1 पछि आउनेछ।
- जब तपाईंले आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू बन्द गरेर फेरि खोल्नुहुन्छ, तिनीहरू सधैं कार्यक्रम 1 मा फर्कनेछन्।

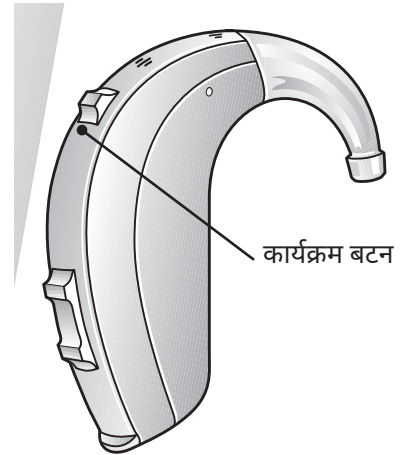

आफ्ना कार्यक्रमहरू यहाँ रेकर्ड गर्नुहोस्:

	कार्यक्रमको नाम	कहिले प्रयोग गर्ने
कार्यक्रम 1		
कार्यक्रम 2		
कार्यक्रम 3		
कार्यक्रम 4		



थप समर्थनको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी समर्थन पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal