



डेनालोजिक एक्टिओको लागि स्लिम ट्यूबहरू सफा गर्ने र प्रतिस्थापन गर्ने

सफाई


पहिले, तपाईंले स्लिम ट्यूब र डोमलाई ओसिलो कपडाले पुछ्न सक्नुहुन्छ। यदि स्लिम ट्यूब मोम वा अन्य फोहोरले भरिएको छ भने, श्रवण यन्त्रको सम्पूर्ण ट्यूबलाई ध्यानपूर्वक तान्दै श्रवण यन्त्रबाट हटाउनुहोस्।

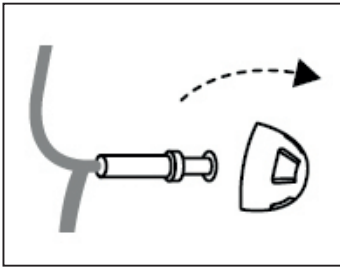

1. अर्को, रिब गरिएको छेउबाट डोमलाई तानेर हटाउनुहोस्।

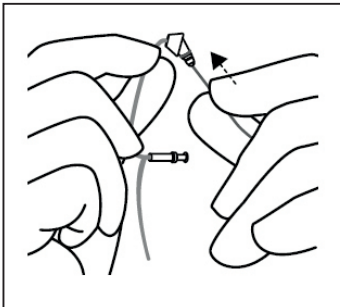


2. अब, स्लिम ट्यूबको माथिल्लो भागबाट सफा गर्ने तार धकेल्नुहोस् जहाँ यो श्रवण यन्त्रमा जडान हुन्छ। कुनै पनि फोहोर पूर्ण रूपमा हटाउन सफा गर्ने तारलाई पूर्ण रूपमा थ्रेड गर्नुहोस्।

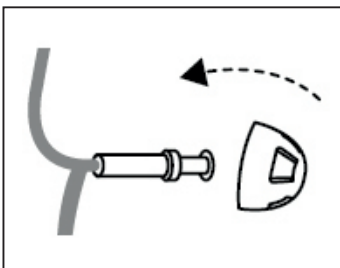


3. अब, डोमलाई स्लिम ट्यूबमा फिर्ता धकेल्नुहोस्।

डेनालोजिक एक्टिओ (जारी) को लागि स्लिम ट्यूबहरू सफा गर्ने र प्रतिस्थापन गर्ने

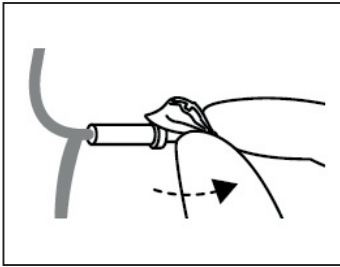

4. डोमको तल्लो भागलाई सावधानीपूर्वक उठाएर र कलरले स्लिम ट्यूबको रिब गरिएको छेउलाई पूर्ण रूपमा ढाक्छ भनेर प्रमाणित गरेर डोम सुरक्षित छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।

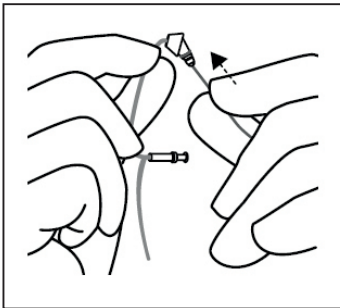

5. अन्तमा, स्लिम ट्यूबलाई श्रवण यन्त्रमा फिर्ता धकेल्नुहोस् जबसम्म यो ठाउँमा दृढतापूर्वक क्लिक गर्दैन।

प्रतिस्थापन

यदि तपाईंलाई आफ्नो स्लिम ट्यूब बदल्न आवश्यक छ भने, तपाईंको श्रवण यन्त्रबाट सम्पूर्ण ट्यूब तान्नुहोस् र नयाँले बदल्नुहोस्, यो क्लिक दृढतापूर्वक ठाउँमा छ भनी सुनिश्चित गर्दै। तपाईंको नयाँ स्लिम ट्यूबमा नयाँ डोम सही रूपमा फिट भएको सुनिश्चित गर्न माथिका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।



थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal