

समस्या निवारण निर्देशिका

लक्षण	कारण	सम्भावित उपचार
आवाज छैन	• श्रवणयन्त्र सक्रिय छैन	• ब्याट्री ढोका खोलेर र बन्द गरेर श्रवणयन्त्र पुनः सुरु गर्नुहोस्
	• मृत ब्याट्री	• ब्याट्री बदल्नुहोस्
	• ब्याट्रीको ढोका राम्ररी बन्द नभएको	• ब्याट्री सही तरिकाले घुसाइएको छ र ब्याट्रीको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्
	• ब्लक गरिएको स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड	• स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड सफा गर्नुहोस्
	• तपाईंको इयरमोल्ड ट्यूबमा कन्डेन्सेसन	• इयरमोल्डबाट आफ्नो श्रवण यन्त्र हटाउनुहोस् र पानी हटाउन इयरमोल्ड हल्लाउनुहोस्। आफ्नो श्रवणयन्त्रमा पुनः जोड्नु अघि इयरमोल्ड 15 मिनेटको लागि न्यानो सुख्खा ठाउँमा राख्नुहोस्
पर्याप्त आवाजमा छैन	• गलत स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड प्लेसमेन्ट	• आफ्नो स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड पुनः घुसाउनुहोस्
	• ब्लक गरिएको स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड/ डोम	• आफ्नो स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड सफा गर्नुहोस् / डोम बदल्नुहोस्
	• ब्लक गरिएको मोम फिल्टर	• मोम फिल्टर परिवर्तन गर्नुहोस्
	• तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको श्रवणशक्ति परिवर्तन भएको छ	• आफ्नो स्थानीय श्रव्य विज्ञान विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• अत्यधिक कानको मोम	• आफ्नो जीपी वा अभ्यास नर्सलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• भोल्याुम धेरै कम सेट गरियो	• पुश बटन प्रयोग गरेर भोल्याुम बढाउनुहोस्/ श्रवणयन्त्रमा टगल गर्नुहोस् वा बिमोर एप प्रयोग गरेर समायोजन गर्नुहोस्

समस्या निवारण निर्देशिका (जारी)

लक्षण	कारण	सम्भावित उपचार
अत्यधिक सिट्टी बजाउने / प्रतिक्रिया	• गलत स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड प्लेसमेन्ट	• स्लिम ट्यूब पुनः घुसाउनुहोस् / इयरमोल्ड
	• अत्यधिक कानको मोम	• आफ्नो जीपी वा अभ्यास नर्सलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड ट्युबिङ जीर्ण वा बिग्रिएको	• आफ्नो स्लिम ट्यूब बदल्नुहोस्/आफ्नो इयरमोल्डमा रहेको ट्युबिङ परिवर्तन गर्नुहोस्
ध्वनि विकृत / स्पष्ट छैन	• कमजोर ब्याट्री	• ब्याट्री बदल्नुहोस्
	• अपर्याप्त इयरमोल्ड वा डोम फिट	• आफ्नो स्थानीय श्रव्य विज्ञान विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• श्रवण यन्त्र बिग्रिएको छ	• आफ्नो स्थानीय श्रवण विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• श्रवण यन्त्र सेटिङहरू इष्टतम छैनन्	• आफ्नो स्थानीय श्रवण विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

यदि यहाँ उल्लेख नगरिएका कुनै अन्य समस्याहरू छन् भने, कृपया आफ्नो स्थानीय श्रवण विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।



थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal