


भोल्युम नियन्त्रण - टगल

भोल्युम नियन्त्रणले तपाईंको श्रवण यन्त्रको भोल्युम बढाउन अनुमति दिनेछ वा घटाउन ।

1. भोल्युम बढाउन, टगलको माथिल्लो छेउमा थिच्नुहोस्।
2. भोल्युम घटाउन, टगलको तल्लो छेउमा थिच्नुहोस्।

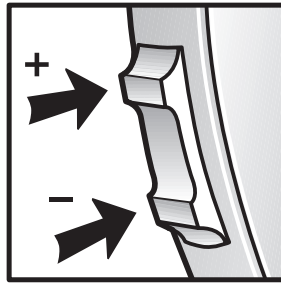

जब तपाईं भोल्युम बढाउनु हुन्छ वा घटाउनु हुन्छ, तपाईंले प्रत्येक प्रेसको लागि बीप सुन्नु हुनेछ। जब तपाईं भोल्युम दायराको माथिल्लो वा तल्लो सीमामा पुग्नुहुन्छ, तपाईंले दोहोरो बीप सुन्नु हुनेछ। यी भोल्युम परिवर्तनहरू अस्थायी हुन् र जब तपाईंले आफ्नो श्रवण यन्त्र पुनः सुरु गर्नुहुन्छ यो तपाईंको श्रव्यविद्ले सेट गरेको भोल्युममा फर्किनेछ। यदि तपाईं 'मनपर्ने' सुविधा प्रयोग गरेर यी भोल्युम नियन्त्रण सेटिङहरू बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया बिमोर एप प्रयोग गर्नुहोस्।



थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal