

ब्याट्री सुरक्षा

यदि निलियो भने, बटन ब्याट्रीहरूले गम्भीर हानि वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। यदि तिनीहरू नाक वा कानमा अड्किए भने पनि तिनीहरूले गम्भीर चोटपटक निम्त्याउन सक्छन्।

यदि तपाईंलाई आफ्नो बच्चा वा आफन्तले बटन ब्याट्री निलेको शंका छ भने:

- तिनीहरूलाई सिधै आफ्नो नजिकको आपतकालीन विभागमा लैजानुहोस् वा एम्बुलेन्सको लागि 999 डायल गर्नुहोस्।
- अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई भन्नुहोस् कि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको बच्चा/नातेदारले बटन ब्याट्री निलेको छ।
- तपाईंसँग समान ब्याट्री र प्याकेजिङ लिनुहोस्। यसले डाक्टरलाई निलिएको ब्याट्रीको प्रकार पहिचान गर्न र उपचार सजिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
- तपाईंको बच्चा/नातेदारलाई खान वा पिउन नदिनुहोस्।
- तिनीहरूलाई बिरामी नबनाउनुहोस्।
- तपाईंको बच्चा/नातेदारले कुनै लक्षण नदेखे पनि तपाईंले A&E मा जानुपर्छ।

श्रवण सहायक ब्याट्रीहरू सुरक्षित राख्ने:

- नयाँ/स्पेयर ब्याट्रीहरूलाई तिनीहरूको मूल ब्लिस्टर प्याकेजिङमा सिल गरिएको कन्टेनरमा राख्नुहोस्। तिनीहरूलाई बालबालिका र कमजोर वयस्कहरूको दृष्टि र पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
- ब्याट्री प्याकेज खोल्दा, तिनीहरू भुइँमा नखस्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्।
- ब्याट्रीहरूलाई सुरक्षित रूपमा र सकेसम्म चाँडो पुनः प्रयोग गर्नुहोस्।
- ब्याट्रीहरूलाई कहिलेकाहीँ चक्की भनेर गलत रूपमा हेरिएको छ। त्यसकारण, बिरामीहरूले कुनै पनि चक्की निल्नु अघि आफ्नो औषधि सावधानीपूर्वक जाँच गर्नु पर्छ, र ब्याट्रीहरूलाई औषधिहरू भन्दा फरक ठाउँमा राख्नु पर्छ।
- श्रवण सहायकहरू (बाल-प्रतिरोधी ब्याट्री लकहरू भएकाहरू पनि) प्रयोगमा नभएको बेला साना बच्चाहरू र कमजोर वयस्कहरूको दृष्टि र पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।



थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal