


सामान्य सफाई र मर्मतसम्भार सल्लाह

तपाईंको डेनालोजिक श्रवण यन्त्रहरूलाई उत्तम सम्भव अवस्थामा राख्नको लागि यहाँ केही उपयोगी सुझावहरू छन्:

- आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू सफा र सुख्खा राख्नुहोस्। तपाईंले चिल्लो वा ओसिलोपन हटाउन र आफ्नो हातहरू सफा र सुख्खा छन् भनी सुनिश्चित गर्न नरम कपडा वा टिस्यु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
- आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू सफा गर्न पानी वा घोलकहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, वा तिनिहरूलाई पानी वा अन्य तरल पदार्थमा डुबाउनुहोस्
- आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू कडा सतहहरूमा नछोड्नुहोस्
- आफ्नो श्रवण यन्त्रहरूलाई प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशमा वा नजिक नछोड्नुहोस्, जस्तै तातो, पार्क गरिएको कारमा, किनकि अत्यधिक गर्मीले आवरणलाई क्षति पुर्याउन सक्छ
- नुहाउँदा, पौडी खेल्दा, भारी वर्षामा वा सौना जस्ता ओसिलो वातावरणमा तिनिहरूलाई नलगाउनुहोस्
- कस्मेटिक्स, अत्तर, आफ्टरशेभ, हेयरस्प्रे वा लोशन लगाउँदा तिनिहरूलाई नलगाउनुहोस् किनकि यसले तपाईंको श्रवण यन्त्रहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छ
- यी बाहेक, कृपया आफ्नो पातलो ट्यूब, डोम, ट्युबिड, इयरमोल्ड कुनै पनि स्पष्ट अवरोधहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् र उचित रूपमा सफा गर्नुहोस्।

श्रवण यन्त्रको माथि / मेरुदण्डमा दुईवटा माइक्रोफोन इनलेटहरू छन्। (माथिल्लो पुश बटनको दुबै छेउमा)। माइक्रोफोनहरू ध्वनि-पारदर्शी फिल्टर द्वारा सुरक्षित छन्; तर, कुनै पनि फिल्टर जस्तै, धुलो र फोहोरले भरिन सक्छ।

प्रत्येक माइक्रोफोन इनलेटमा श्रवण यन्त्र सफा गर्न प्रत्येक अर्को दिन ब्रश गर्न ब्रुशको प्रयोग गर्नुहोस्।

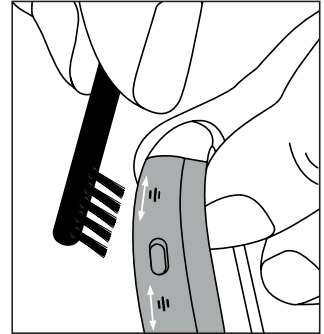

थप सहायताको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal