



Colocación y extracción de tubos finos

1. Empiece colgándose el audífono sobre la parte superior de la oreja.

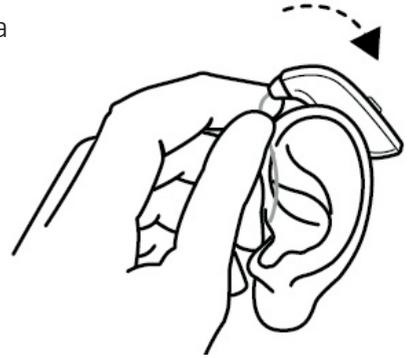

2. A continuación, sujete el tubo por donde se dobla y empuje suavemente el domo hacia el interior de su canal auditivo.

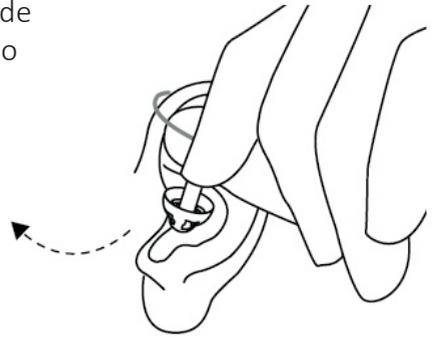


3. Empuje el domo lo suficiente dentro de su canal auditivo para que el tubo descansa a ras de la cabeza.




4. Por último, en cada tubo hay un cable de retención que debe colocarse en la cavidad de la oreja.

Colocación y extracción de tubos finos (continuación)

5. Para quitarse el audífono, levánteselo primero de la oreja.

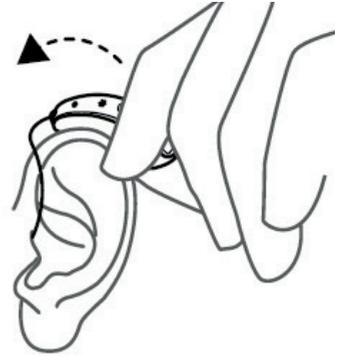

6. A continuación, sujete el tubo por donde se dobla y tire suavemente de él para sacárselo del canal auditivo.

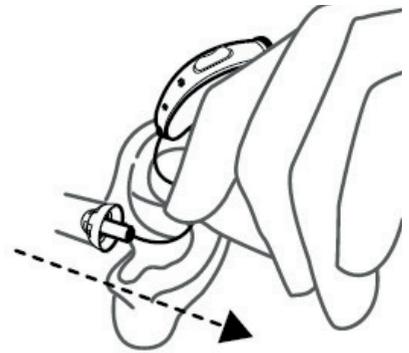

Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: danalogic.es/patient-portal