

# Colocación y extracción del molde auricular

Para colocar el molde auricular, sujételo entre los dedos pulgar e índice y coloque la salida de sonido en el canal auditivo.



Deslice el molde hasta el fondo de la oreja con un suave movimiento giratorio. Asegúrese de que la parte superior del molde auricular se introduce detrás del pliegue de piel situado sobre el conducto auditivo.




Una vez que el molde auricular esté en su sitio, empuje el audífono hacia delante y deslícelo hacia atrás para que se asiente cómodamente detrás de la oreja.

Algunas personas consideran que el uso de un espejo ayuda a introducir el molde auricular y, una vez colocado correctamente, debe quedar ajustado pero cómodo.

## Colocación y extracción del molde auricular (continuación)

Para retirar el molde, levante el audífono de detrás de la oreja y déjelo colgando junto a la oreja.

Con los dedos pulgar e índice, tire suavemente del molde auricular para separarlo de la oreja. Es posible que tenga que doblar ligeramente el molde auricular para extraerlo por completo.

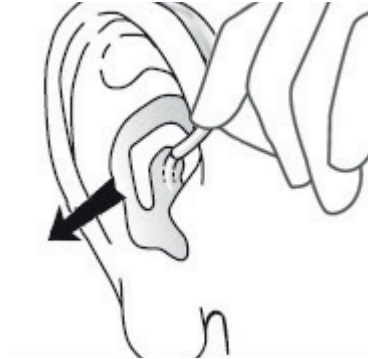

Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: **[danalogic.es/patient-portal](https://danalogic.es/patient-portal)**