


# Cómo encender y apagar los audífonos y cambiar la pila

## Encendido

Con la pila colocada, cierre completamente el portapilas para encender los audífonos.

## Apagado

Abra el portapilas hasta que oiga un clic para apagar los audífonos.

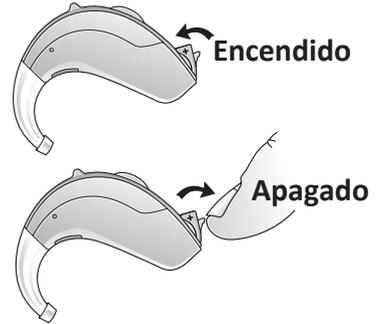

## Cambio de pilas

### Cuando la pila se está agotando

- Sus audífonos emitirán un pitido cuando la pila esté empezando a agotarse.
- Este pitido de aviso se repetirá cada 15 minutos hasta que la pila se haya agotado por completo.

# Cómo encender y apagar los audífonos y cambiar la pila (continuación)

## Para cambiar la pila

- Retire la etiqueta adhesiva de la pila nueva.
- Abra el portapilas.
- Retire la pila usada tirando hacia arriba.
- Inserte la pila nueva en su lugar. Asegúrese de que el lado plano (marcado con +) esté hacia arriba.



## CONSEJO:

*Para ahorrar pila, apague el audífono cuando no lo esté utilizando.*



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: [danalogic.es/patient-portal](https://danalogic.es/patient-portal)