

# El botón de programa

- Sus audífonos pueden tener hasta 4 programas diferentes. Los programas pueden seleccionarse mediante el botón situado en la parte posterior de los audífonos. En la imagen puede ver un ejemplo de dónde se encuentra el botón.
- Para cambiar de programa, pulse el botón. El número de pitidos que escuche indica el programa en el que se encuentra.  
1 pitido = Programa 1  
2 pitidos = Programa 2, etc.
- Los programas seguirán un orden numérico. Por ejemplo, el programa 2 seguirá al programa 1.
- Cuando apague y vuelva a encender los audífonos, siempre volverán al programa 1.



## Registre aquí sus programas:

|            | Nombre del programa | Cuándo utilizarlo |
|------------|---------------------|-------------------|
| Programa 1 |                     |                   |
| Programa 2 |                     |                   |
| Programa 3 |                     |                   |
| Programa 4 |                     |                   |



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)