
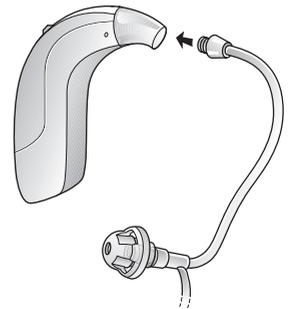


# Limpieza y sustitución de tubos finos para Ambio y Ambio Smart

## Limpieza

1. Extraiga el tubo fino del audífono desenroscándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Limpie el tubo fino y el domo con un paño húmedo.
3. A continuación, introduzca el cable de limpieza por la parte superior del tubo fino, donde se conecta al audífono. Pase el cable de limpieza completamente para eliminar todos los residuos.

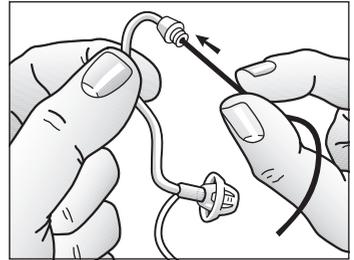

## CONSEJO:

*El tubo fino y los domos deben sustituirse cuando los componentes se vuelvan rígidos, quebradizos o se doblen.*

## Sustitución

1. Extraiga el tubo fino del audífono desenroscándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque el tubo fino de recambio enroscándolo en el sentido de las agujas del reloj.



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: [danalogic.es/patient-portal](https://danalogic.es/patient-portal)