


Control de volumen: conmutador

El control de volumen permite subir o bajar el volumen de sus audífonos.

1. Para aumentar el volumen, pulse el extremo superior del conmutador o palanca.
2. Para bajar el volumen, pulse el extremo inferior del conmutador o palanca.

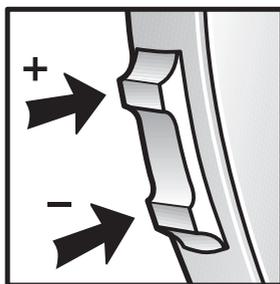

Cuando suba o baje el volumen oírás un pitido por cada pulsación. Cuando alcance el límite superior o inferior del rango de volumen oírás un doble pitido. Estos cambios de volumen son temporales y cuando reinicie el audífono volverá al volumen establecido por su audiólogo. Utilice la aplicación BeMore si desea guardar estos ajustes de control de volumen mediante la función «Favoritos».



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: danalogic.es/patient-portal