

# Seguridad de las pilas

Si se ingieren, las pilas de botón pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. También pueden causar lesiones importantes si se alojan en la nariz o el oído.

## Si sospecha que su hijo o familiar se ha tragado una pila de botón:

- Llévelo directamente al servicio de urgencias más cercano o llame al 112 para pedir una ambulancia.
- Informe al personal del hospital de que cree que su hijo/familiar se ha tragado una pila de botón.
- Lleve una pila similar y el envoltorio. Esto ayudará al médico a identificar el tipo de pila ingerida y facilitará el tratamiento.
- No deje que su hijo/ familiar coma ni beba.
- No haga que se ponga enfermo.
- Debe acudir a urgencias aunque su hijo/familiar no presente síntomas.

## Mantenga seguras las pilas de los audífonos:

- Conserve las pilas nuevas/de repuesto en su blíster original en un recipiente hermético. Manténgalas fuera de la vista y del alcance de niños y adultos vulnerables.
- Al abrir el paquete de pilas, tenga cuidado de que no caigan al suelo.
- Recicle las pilas de forma segura y lo antes posible.
- En ocasiones, las pilas se han confundido con pastillas. Por lo tanto, los pacientes deben comprobar cuidadosamente sus medicamentos antes de tragar cualquier pastilla, y las pilas deben guardarse en un lugar distinto al de los medicamentos.
- Mantenga los audífonos (incluso los equipados con cierre de pila a prueba de niños) fuera de la vista y del alcance de niños pequeños y adultos vulnerables cuando no se utilicen.



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: [danalogic.es/patient-portal](https://danalogic.es/patient-portal)