


danalogic GN

danalogic Actio

新型蓝牙® 助听器

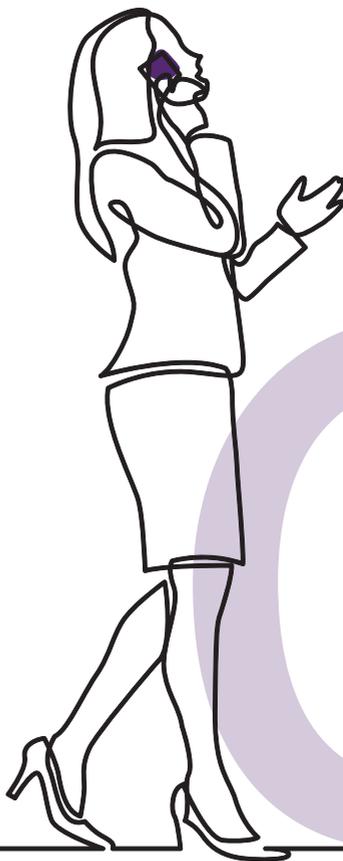

新型 danalogic action 助听器有蓝牙功能。

这是好消息, 因为蓝牙功能可以让您直接通过您的助听器传输智能设备上的声音(电话、音乐和其他音频)。

有关此功能的兼容智能设备, 请点击[这里](#)查看列表

www.danalogic.co.uk/connectivity


Danalogic Actio 还支持与选定的 Apple®设备进行免提通话。免提通话允许您使用助听器接听电话, 助听器将充当麦克风来接收您的声音, 并将您手机中的声音直接传输到助听器中。欲了解与该功能兼容的苹果设备列表, 请访问www.danalogic.co.uk/connectivity**网站**

蓝牙助听器的优势

- 戴着助听器打电话可能很麻烦。新助听器能让您直接接听电话和视频通话。这样更容易听清说话的内容。
- 您不再需要戴着耳机从智能设备上听音乐、视频或其他音频，因为声音将流进传入您的助听器。

通过蓝牙连接您的助听器


如果您有兼容的智能设备，请按照本手册中的说明将助听器连接到设备上。

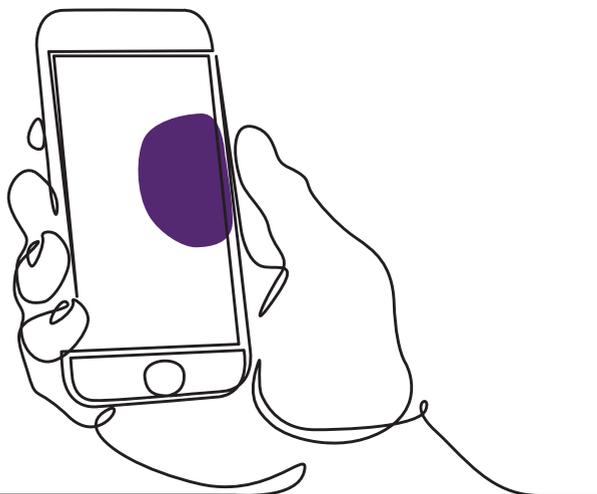

如何将您的助听器与 Apple 设备配对

1. 关闭助听器。
2. 通过苹果设备上的“设置”菜单打开蓝牙。激活蓝牙时，滑块变为绿色。
3. 回到主设置菜单，然后点击“辅助功能”。
4. 向下滑动到“听力设备”。
5. 如果您的助听器已经打开，请重新启动。否则，请打开助听器。这能保证您的苹果设备监测到您的助听器。



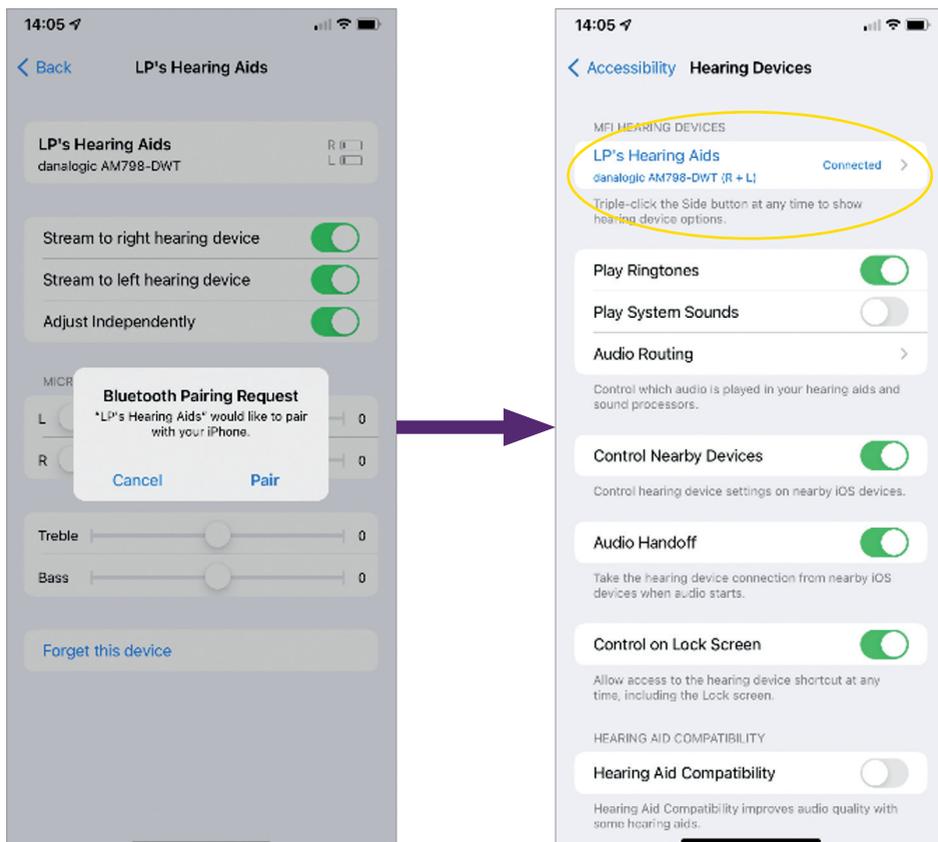

6. 点击“配对”。如果您有两个助听器，需要接受两次。
7. 进入应用商店，为助听器搜索“BeMore”。
8. 下载 BeMore 应用程序。打开它，点击“开始”。
9. 按照屏幕上的说明连接到应用程序。现在您已经准备好了。

注意: 以下是 iOS 13 及更新版本的操作步骤

如果您需要配对您的苹果设备

如果您的一个或两个助听器已经更换，您需要将它们重新配对到您的智能设备上。


1. 首先进入设置菜单移除旧的助听器。
2. 向下滑动并选择“无障碍”。
3. 选择“听力设备”。
4. 在屏幕上的“MFI听力设备”部分选择助听器，然后点击“忘记这个设备”。
5. 重新启动新的助听器并按“配对”键。如果您戴着两个助听器，您需要点击“配对”两次。



如何在 iPhone® 和 iPad® 上使用 Danalogic Actio 的免 提通话功能

请查看我们的网站 go.gn.com/app-support 确
认您的设备是否兼容


| 功能 | 如何 |
|----------------------------|---|
| 接听电话 | 在 iPhone/iPad 上按一下助听器按钮 或滑动即可接听电话 |
| 结束通话 | 按住助听器按钮几秒钟即可结束通 话。或者, 点击您屏幕上的红色按键, 结束通话 |
| 二次来电 | 如果您正在通话, 又有新来电, 请长 按助听器按钮或轻按 iPhone 或 iPad 屏幕上的“拒接”键拒接 |
| 调节音量 | 使用 iPhone 或 iPad 上的按钮 上下键按钮 |
| 在 iOS 助听器 设置中关闭免提 呼叫 | 三次点击 iPhone 按钮就可以进入 iOS 助听器设置(您也可以通过控制中 心进行访问)。选择“输入选项”然后 选择“关闭” |

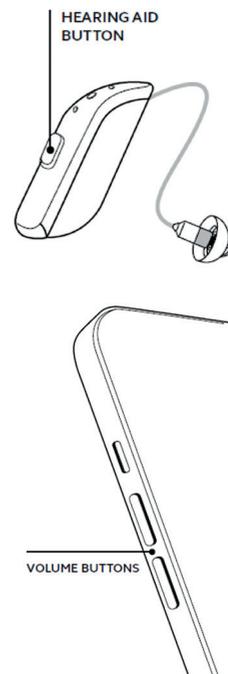

扫描二维码即可获取如何视频或参观:
danalogic.co.uk/patient-portal

如何将您的助听设备与 Android™ 设备配对

1. 进入 Google Play 应用商店, 搜索 BeMore 并下载应用程序。
2. 下载完成后, 打开应用程序, 点击“开始”。
3. 按照屏幕上的说明连接到应用程序。现在您已经准备好了。

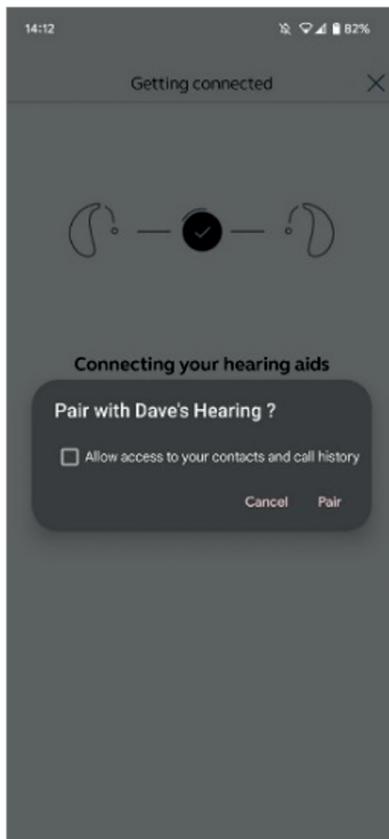

如果您需要重新配对您的 Android 设备

如果您的一个或两个助听器已经更换，您需要将它们重新配对到您的智能设备上。

1. 从屏幕顶部向下滑动，打开“设置”菜单，然后按住蓝牙图标 2 秒。
2. 长按“助听器设置”图标 2 秒。
3. 选择“忘记”。
4. 打开 BeMore 应用程序。
5. 打开“BeMore 菜单”并选择“配对新的助听器”。然后按照屏幕上的说明进行连接。现在您已经准备好了。



danalogic GN

如果您有疑问, 请登录我们的网站 www.danalogic.co.uk 获取更多指导或联系您的听力专家。



扫描我即时访问助听器帮助, 护理说明, 如何获取视频及更多资讯。

© 2022 GN ReSound Group 版权所有。Danalogic 是 GN Hearing A/S 的商标。Apple 和 Apple 标志是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其他国家注册的商标。应用商店是苹果公司的服务商标, 在美国和其他国家注册。Android、Google Play 和 Google Play 标志是谷歌LLC的商标。蓝牙文字标志和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标。



danalogic GN

北大欧通讯设备有限公司的 Danalogic 更加努力地
在整个患者旅程中推动积极的结果, 使英国国家医疗
服务体系能够在真正重要的地方提供更好的护理。

Danalogic 是北大欧通讯设备有限公司的一部分-从
世界领先的听力设备到捷波朗办公耳机和运动耳机,
开创了伟大的声音。建于 1869 年并且员工多达
5,000 人。北大欧通讯设备让生活听起来更美好。

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
电话: +44 1869 352 800
传真: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk