


تنظيف الأنابيب الرفيعة واستبدالها لجهاز danalogic Extend


التنظيف

أولاً، يمكنك مسح الأنبوب الرفيع والقبة بقطعة قماش مبللة. إذا كان الأنبوب الرفيع مسدوداً بالشمع أو غيره من البقايا، فقم بإزالته من سماعة الأذن عن طريق سحب الأنبوب بأكمله بعناية من سماعة الأذن.


1. بعد ذلك، قم بإزالة القبة عن طريق سحبها من الطرف المضلع.

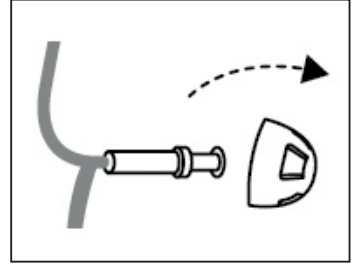

2. الآن، ادفع سلك التنظيف عبر الجزء العلوي من الأنبوب الرفيع من مكان اتصاله بسماعة الأذن. قم بتمرير سلك التنظيف بالكامل للتخلص من أي بقايا بالكامل.

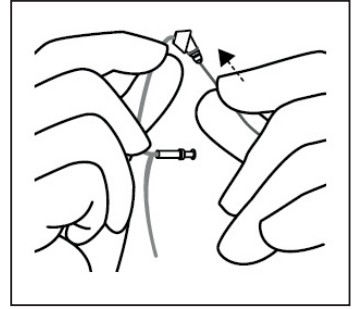


3. الآن، ادفع القبة مرة أخرى داخل الأنبوب الرفيع.

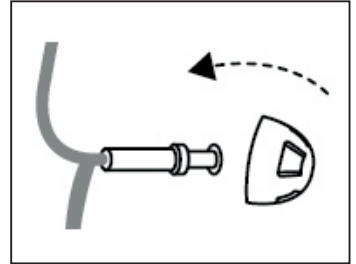


تنظيف الأنابيب الرفيعة من danalogic Extend واستبدالها (تابع)

4. تأكد من تثبيت القبة من خلال رفع الجزء السفلي من القبة بعناية، والتحقق من تغطية الطوق بالكامل للطرف المضلع من الأنبوب الرفيع.

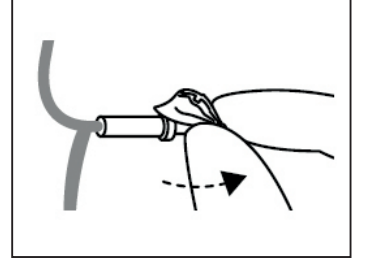

5. أخيرًا، ادفع الأنبوب الرفيع مرة أخرى داخل سماعة الأذن حتى يصدر صوت نقر بتثبيته في مكانه.

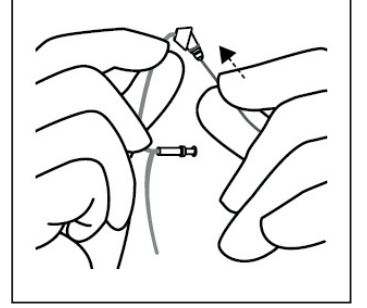

الاستبدال

إذا كنت بحاجة إلى استبدال الأنبوب الرفيع، اسحب الأنبوب بأكمله من سماعة الأذن الخاصة بك واستبدله بأنبوب جديد، وتأكد من إصدار صوت نقر بتثبيته في مكانه. اتبع الإرشادات أعلاه لضمان تركيب القبة الجديدة بشكل صحيح على الأنبوب الرفيع الجديد.

لمزيد من الدعم، امسح رمز الاستجابة السريعة أو يمكنك زيارة بوابة دعم المرضى لدينا من خلال: danalogic.co.uk/patient-portal

