


كيفية الاستمتاع بالمكالمات عن بُعد لجهاز iPhone و iPad مع أجهزة danalogic Extend

يُرجى التأكد من أن جهازك متوافق من خلال التحقق من موقعنا على الويب

www.danalogic.co.uk/connectivity

زر سماعة
الأذن

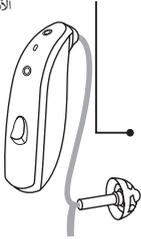

أزرار مستوى الصوت

الوظيفة	كيفية الاستخدام
الرد على مكالمة	اضغط ضغطة قصيرة على زر أو شريحة السمع للرد من خلال جهاز iPhone/iPad
إنهاء المكالمة	اضغط ضغطة طويلة على زر سماعة الأذن لبضع ثوان لإنهاء المكالمة. أو بدلاً من ذلك، يمكنك إنهاء المكالمة عن طريق النقر على الزر الأحمر على شاشتك
المكالمات الثانية الواردة	إذا كنت تجري مكالمة وكانت هناك مكالمات ثانية واردة، يمكنك رفضها من خلال الضغط مطوئاً على زر سماعة الأذن الخاص بك أو انقر فوق "رفض" على شاشة جهاز iPhone أو iPad
تغيير مستوى الصوت	استخدم أزرار مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في جهاز iPhone أو iPad
قم بإيقاف تشغيل المكالمات عن بُعد في إعدادات السمع لنظام iOS	انقر ثلاث مرات فوق زر iPhone للوصول إلى إعدادات مساعدة السمع لجهاز iOS (كما يمكنك الوصول عبر مركز التحكم). حدد "خيارات الإدخال" ثم "إيقاف".



لمزيد من الدعم، امسح رمز الاستجابة السريعة أو يمكنك زيارة بوابة دعم المرضى لدينا من خلال: danalogic.co.uk/patient-portal