


نصيحة حول التنظيف العام والصيانة

إليك بعض النصائح المفيدة للحفاظ على سماعة الأذن من Danalogic في أفضل حالة ممكنة:

- حافظ على نظافة سماعة الأذن لديك وبقائها جافة. يمكنك استخدام قطعة قماش ناعمة أو منديل لإزالة الشحم أو الرطوبة وتأكد من نظيفة يديك وبقائها جافة
- لا تستخدم الماء أو المذيبات لتنظيف سماعة الأذن لديك، أو تغمرها في الماء أو غيرها من السوائل
- تجنب إسقاط سماعة الأذن لديك على الأسطح الصلبة
- لا تترك سماعة الأذن الخاصة بك في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب منها، مثل سيارة ساخنة متوقفة، لأن الحرارة المفرطة قد تسبب أضرارًا للغلاف
- لا ترتديها في أثناء الاستحمام أو السباحة أو الأمطار الغزيرة أو في جو رطب مثل الساونا

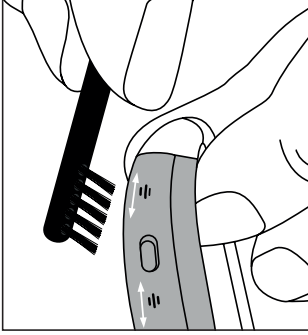

- قم بإزالة سماعة الأذن الخاصة بك عند وضع مستحضرات التجميل أو العطور أو الحلاقة أو مثبتات الشعر أو الغسول لأنها قد تتسبب في إتلاف سماعة الأذن الخاصة بك
- بالإضافة إلى ذلك، يُرجى التحقق من وجود أي انسداد ظاهري في الأنبوب الرقيق، أو القبة، أو الأنابيب، أو الأذن وتنظيفها جيدًا

في الجزء العلوي / ظهر سماعة الأذن يوجد مداخل ميكروفون. (على جانبي زر الضغط العلوي). يتم حماية الميكروفونات بواسطة مرشح صوتي شفاف؛ ولكن ، مثله مثل أي مرشح، يمكن أن يسده الغبار والبقايا.

استخدم فرشاة تنظيف سماعة الأذن في تنظيف كل مدخل ميكروفون يوم بعد يوم.

لمزيد من الدعم، امسح رمز الاستجابة السريعة أو يمكنك زيارة بوابة دعم المرضى لدينا من خلال: danalogic.co.uk/patient-portal

