



Почистване и подмяна на тънките тръбички за danalogic Extend

Почистване


Първо можете да избършете тънката тръбичка и купола с влажна кърпа. Ако тънката тръбичка е запушена с ушна кал или други замърсявания, извадете я от слуховия апарат, като внимателно издърпате цялата тръбичка от него.

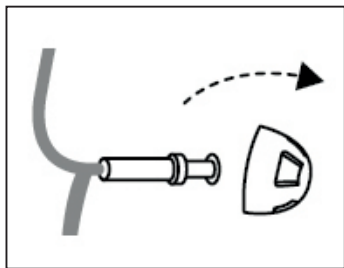

1. След това свалете купола, като го издърпате от оребрения край.

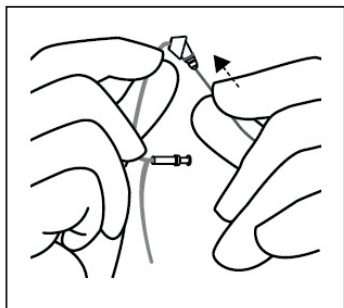


2. Сега прокарайте почистващата тел през горната част на тънката тръбичка, където тя се свързва със слуховия апарат. Прокарайте почистващата тел докрай, за да отстраните всички замърсявания.

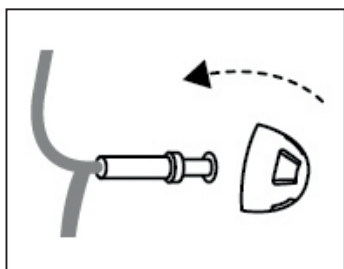


3. Сега поставете купола обратно върху тънката тръбичка.

Почистване и подмяна на тънките тръбички за danalogic Extend (продължение)

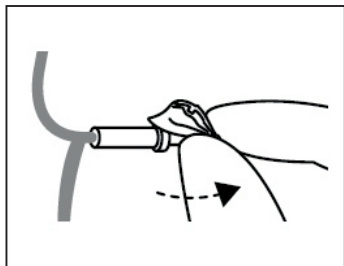

4. Проверете дали куполът е закрепен, като внимателно повдигнете долната част на купола и проверите дали маншетът покрива напълно оребрения край на тънката тръбичка.

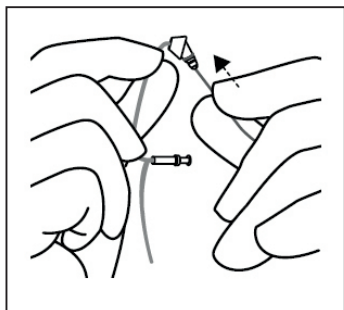

5. Накрая натиснете тънката тръбичка обратно върху слуховия апарат, докато щракне здраво на мястото си.

Замяна

Ако се налага да замените тънката тръбичка, издърпайте цялата тръбичка от слуховите апарати и я заменете с нова, като се уверите, че новата е закрепена здраво. Следвайте инструкциите по-горе, за да сте сигурни, че новият купол е правилно поставен върху новата тънка тръбичка.



За допълнителна подкрепа сканирайте QR кода или посетете нашия портал за подкрепа на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal