


Как да се наслаждавате на разговори със свободни ръце за iPhone и iPad с danalogic Extend

Моля, уверете се, че вашето устройство е съвместимо, като проверите на нашия уебсайт тук www.danalogic.co.uk/connectivity

Функция	Как се извършва
Приемане на повикване	Използвайте кратко натискане на бутона на слуховия си апарат или плъзване, за да отговорите на iPhone/iPad
Прекратяване на повикване	Натиснете и задръжте бутона на слуховия си апарат за няколко секунди, за да прекратите повикването. Можете също така да затворите, като докоснете червения бутон на екрана
Второ входящо повикване	Ако провеждате разговор и получите второ входящо повикване, можете да го откажете, като натиснете продължително бутона на слуховия си апарат или докоснете „Decline“ (Отказ) на екрана на iPhone или iPad
Промяна на силата на звука	Използвайте бутоните за увеличаване и намаляване на звука на iPhone или iPad
Изключване на повикванията със свободни ръце в настройките на слуховия апарат в iOS	Кликнете три пъти върху бутона за натискане на iPhone, за да получите достъп до настройките на слуховия апарат в iOS (можете да получите достъп и чрез Control Centre (Центъра за управление)). Изберете „Input Options“ (Опции за въвеждане) и след това „Off“ (Изкл.).

БУТОН НА СЛУХОВИЯ АПАРАТ

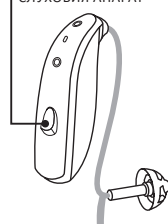

За допълнителна подкрепа сканирайте QR кода или посетете нашия портал за подкрепа на пациенти на адрес: danalogic.co.uk/patient-portal