


Разпознаване на десни и леви слухови апарати за danalogic Extend

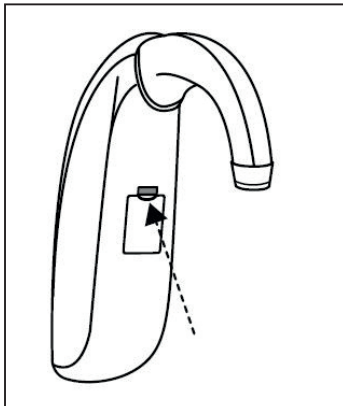

Слуховите ви апарати са програмирани за всяко ухо. Важно е да носите правилния слухов апарат във всяко ухо и да не ги разменяте. Слуховите ви апарати имат цветни маркери, които помагат да разберете за кое ухо са програмирани.

Червеният маркер е на десния слухов апарат, а синият – на левия слухов апарат.

Изображението на тази страница показва къде можете да намерите цветния маркер.

Ако не можете да видите цветните маркери, моля, свържете се с местния аудиологичен отдел.



За допълнителна подкрепа сканирайте QR кода или посетете нашия портал за подкрепа на пациенти на адрес: danalogic.co.uk/patient-portal