

# Контролни настройки на LED светлината на danalogic Extend VTE

	Действие на софтуера	Включване	Изключване	В зарядно устройство		Слаба батерия
				Зарежда се	Напълно заредена	
Контролни настройки на LED светлината	Деактивирано					
	Еднократно мигване					
	Непрекъснато мигване					

	Действие на софтуера	Промяна на силата на звука	Ограничение на силата на звука	Статус на програмата	DAI	Самолетен режим
Контролни настройки на LED светлината	Деактивирано	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Еднократно мигване			Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4 1 x при натискане		 1 x когато е активирано (1 дълго мигане, след това четири двойни мигания)
	Непрекъснато мигване			Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4 1 x при натискане		 1 x когато е активирано (1 дълго мигане, след това четири двойни мигания)

Бележки:

- Предупреждението за изтощена батерия има приоритет пред всички останали индикатори.



За допълнителна подкрепа сканирайте QR кода или посетете нашия портал за подкрепа на пациенти на адрес: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)