


Общи съвети за почистване и поддръжка

- Поддържайте слуховите си апарати чисти и сухи. Можете да използвате мека кърпа или салфетка за отстраняване на омазнявания или влага и да се грижите ръцете ви да бъдат чисти и сухи
- Не използвайте вода или разтворители за почистване на слуховите си апарати и не ги потапяйте във вода или други течности
- Избягвайте да изпускате слуховите си апарати върху твърди повърхности
- Не оставяйте слуховите си апарати на пряка слънчева светлина или в близост до нея, например в гореща паркирана кола, тъй като прекомерната топлина може да доведе до повреда на корпуса
- Не ги носете, докато се къпете, плувате, при силен дъжд или във влажна среда, например в сауна
- Сваляйте слуховите си апарати, когато използвате козметика, парфюм, афгършейв, лак за коса или лосион, тъй като те могат да повредят слуховите ви апарати
- В допълнение към това, моля, проверявайте тънката тръбичка, купола, тръбите и ушната отливка за очевидни запушвания и ги почиствайте по подходящ начин

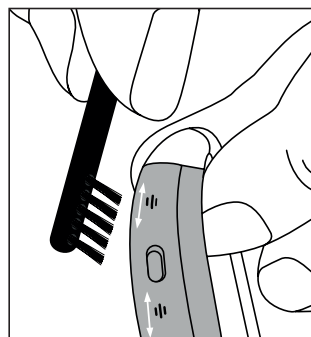

В горната част / отстрани на слуховия апарат има два входа за микрофон. (от двете страни на горния бутон).

Микрофоните са защитени от звукопропусклив филтър, но както всеки филтър, той може да се задръсти с прах и замърсявания.

През ден използвайте четка за почистване на слухови апарати, за да почиствате всеки вход за микрофон.



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за помощ на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal