



Čištění a výměna tenkých hadiček pro danalogic Extend

Čištění


Nejprve můžete otřít tenkou hadičku a koncovku vlhkým hadříkem. Pokud je tenká hadička ucpaná ušním mazem nebo jinými nečistotami, odpojte ji od sluchadla opatrným vytažením celé hadičky ze sluchadla.

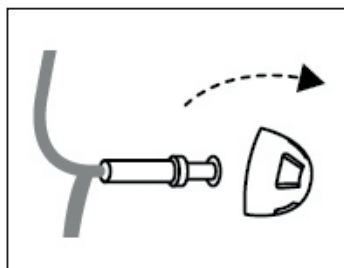

1. Dále odstraňte nástavec jejím stažením z žebrovaného konce.

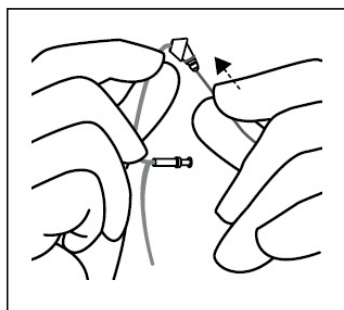


2. Nyní vsuňte čisticí drátek do horní části tenké hadičky, kde se připojuje ke sluchadlu. Protáhněte čisticí drátek úplně, abyste odstranili veškeré nečistoty.

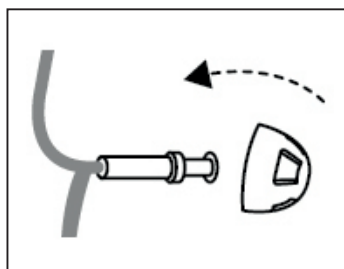


3. Nyní nasadte nástavec zpět na tenkou hadičku.

Čištění a výměna tenkých hadiček pro danalogic Extend (pokračování)

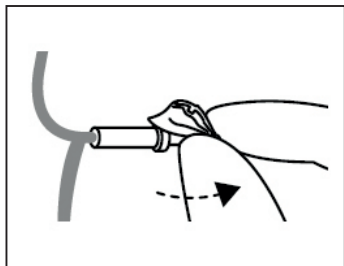

4. Zkontrolujte, zda je nástavec bezpečně nasazen, opatrným zvednutím spodní části nástavce a ověřením, zda límec zcela zakrývá žebrovaný konec tenké hadičky.

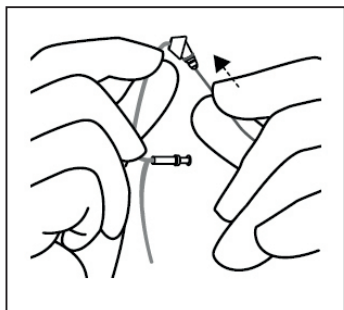

5. Nakonec zatlačte tenkou hadičku zpět na sluchadlo, dokud pevně nezacvakne.

Výměna

Pokud potřebujete vyměnit tenkou hadičku, vytáhněte celou hadičku ze sluchadel a nahradte ji novou, přičemž zajistěte, aby tato pevně zacvakla na své místo. Postupujte podle výše uvedených pokynů, abyste zajistili správné nasazení nového nástavce na novou tenkou hadičku.



Pro další podporu naskenujte QR kód nebo navštivte náš portál podpory pacientů na adrese: danalogic.co.uk/patient-portal