


Jak si dopřát hands-free hovory s danalogic Extend pro iPhone a iPad

Zkontrolujte prosím, zda je vaše zařízení kompatibilní, na našich webových stránkách zde www.danalogic.co.uk/connectivity

Funkce	Postup
Přijetí hovoru	Krátce stiskněte tlačítko na sluchové pomůcce nebo posuňte prstem na iPhone/iPadu pro přijetí hovoru
Ukončení hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko na sluchové pomůcce po dobu několika sekund pro ukončení hovoru. Hovor případně můžete ukončit klepnutím na červené tlačítko na obrazovce
Druhý příchozí hovor	Pokud jste uprostřed hovoru a přichází druhý hovor, odmítněte ho dlouhým stiskem tlačítka na sluchové pomůcce nebo klepnutím na „Odmítnout“ na obrazovce iPhone nebo iPadu
Změna hlasitosti	Použijte tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti na iPhone nebo iPadu
Vypnutí hands-free hovoru v nastavení sluchové pomůcky v iOS	Tříkrát stiskněte tlačítko na iPhone pro přístup k nastavení sluchové pomůcky v iOS (přístup můžete získat také přes Ovládací centrum). Vyberte „Možnosti vstupu“, následně „Vypnout“.

TLAČÍTKO SLUCHOVÉ POMŮCKY

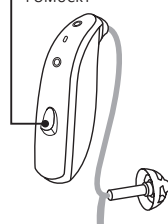

TLAČÍTKO HLASITOSTI



Pro další podporu naskenujte QR kód nebo navštivte náš portál podpory pacientů na adrese: danalogic.co.uk/patient-portal