


Obecné rady pro čištění a údržbu

Zde je několik užitečných tipů, jak udržet vaše sluchové pomůcky danalogic v co nejlepším stavu:

- Udržujte sluchadla čistá a suchá. K odstranění mastnoty nebo vlhkosti můžete použít měkký hadřík nebo papírový kapesník a ujistěte se, že máte čisté a suché ruce
- K čištění sluchových pomůcek nepoužívejte vodu ani rozpouštědla a neponořujte je do vody nebo jiných kapalin
- Zabraňte pádu sluchových pomůcek na tvrdé povrchy
- Nenechávejte sluchové pomůcky na přímém slunci nebo v jeho blízkosti, například v horkém zaparkovaném autě, protože nadměrné teplo může poškodit pouzdro
- Nenoste je při sprchování, plavání, v silném dešti nebo ve vlhkém prostředí, jako je sauna
- Při použití kosmetiky, parfému, vody po holení, laku na vlasy nebo pleťového mléka sluchové pomůcky vyjměte, protože je mohou poškodit
- Kromě toho zkontrolujte tenkou hadičku, nástavec, trubičku, ušní tvarovku, zda nejsou viditelně ucpané, a vhodně vyčistěte

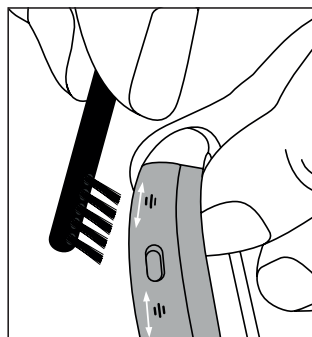

Na horní/hřbetní straně sluchadla jsou dva vstupy mikrofonu. (Na obou stranách horního tlačítka). Mikrofony jsou chráněny zvukově propustným filtrem, ale stejně jako každý filtr se mohou zanést prachem a nečistotami.

Každý druhý den použijte čisticí kartáček na sluchové pomůcky a vyčistěte vstup každého mikrofonu.



Pro další pomoc naskenujte QR kód nebo navštivte náš portál
zákaznické podpory na: **danalogic.co.uk/patient-portal**