



清洁及更换 danalogic Extend 助听器导声管

清洁


可先用湿布擦拭导声管和受话器。如果导声管被耳蜡或其他碎屑堵塞，请小心地将整个导声管从助听器上拔下。

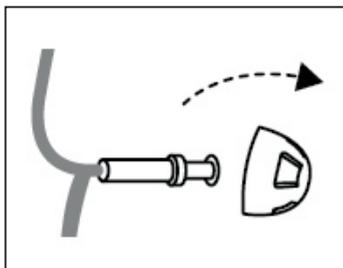

1. 然后，将受话器从导声管棱形端上取下。

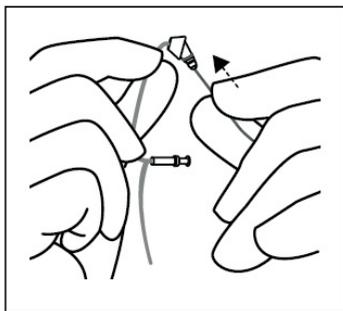


2. 接下来，将清洁线从导声管与助听器连接处的顶端插入。将清洁线从导声管中完全穿过，以便彻底清除碎屑。

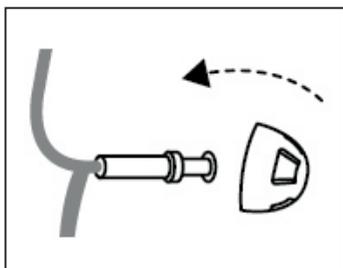


3. 然后，将受话器重新安装到导声管上。

清洁及更换 danalogic Extend 助听器导声管 (续)

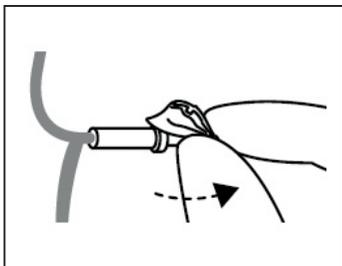

4. 轻轻掀起受话器下部, 检查受话器是否已安装妥当 (即套环完全包覆导声管棱形端)。

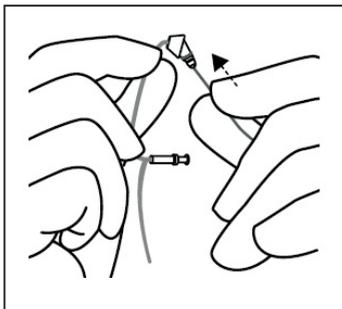

5. 最后, 将导声管重新插入助听器并确保其连接到位。

更换

如需更换导声管, 请将整个导声管从助听器上拔下, 然后将新的导声管插入助听器并确保其连接到位。请遵循上述步骤, 确保新的受话器正确安装在新的导声管上。



如需更多支持, 请扫描二维码或访问我们的患者支持门户, 网址: danalogic.co.uk/patient-portal