


如何通过 danalogic Extend 助听器使用 iPhone 和 iPad 的免提通话功能

请确保您的设备兼容相关功能, 详情请查阅我们的网站:
www.danalogic.co.uk/connectivity

功能	使用方法
接听来电	短按助听器按钮或滑动即可在 iPhone/iPad 上接听来电
结束通话	按住助听器按钮数秒即可结束通话。点击屏幕上的红色按钮也可结束通话
第二通来电	如果在通话过程中有第二通来电拨入, 您可以长按助听器按钮或点击 iPhone/iPad 屏幕上的“拒绝”按钮拒接来电
调节音量	使用 iPhone 或 iPad 上的增加和减少音量按钮
在 iOS 的助听器设置中关闭免提通话	连按三次 iPhone 按钮进入 iOS 的助听器设置 (也可通过控制中心进入)。选择“输入选项”, 然后选择“关闭”。

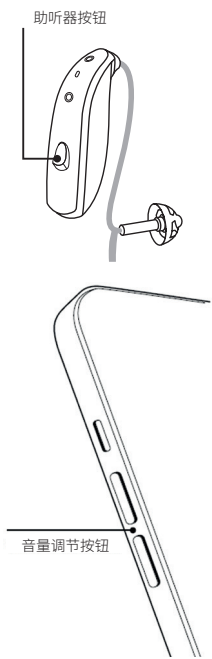

如需更多支持, 请扫描二维码或访问我们的患者支持门户, 网址: danalogic.co.uk/patient-portal