
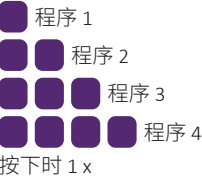


danalogic Extend BTE 助听器 LED 指示灯控制设置

	软件操作	开机	关机	在充电器中		电量不足
				充电中	已充满	
LED 指示灯 控制设置	禁用					
	闪烁一次					
	持续闪烁					

	软件操作	调节音量	音量限制	程序状态	DAI	飞行模式
LED 指示灯 控制设置	禁用	 熄灭	 熄灭	 熄灭	 熄灭	 熄灭
	闪烁一次	 按下时 1 x	 达到时 1 x	 程序 1 程序 2 程序 3 程序 4 按下时 1 x	 启用时 1 x	 启用时 1 x (1 次长闪, 然后 4 次双闪)
	持续闪烁	 按下时 1 x	 达到时 1 x	 程序 1 程序 2 程序 3 程序 4 按下时 1 x	 启用时 1 x	 启用时 1 x (1 次长闪, 然后 4 次双闪)

注：
• 电量不足警告优先于所有其他指示。

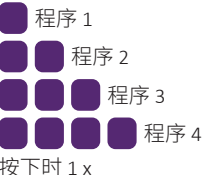

如需更多支持, 请扫描二维码或访问我们的患者支持门户, 网址: danalogic.co.uk/patient-portal