



Czyszczenie i wymiana cienkich dźwiękowodów danalogic Extend

Czyszczenie


Zacznij od wytarcia cienkiego dźwiękowodu i kopułki wilgotną ściereczką. Jeśli cienki dźwiękowód zatkał się woskiem lub innymi zanieczyszczeniami, delikatnie pociągnij za cienki dźwiękowód, aby odłączyć go od aparatu słuchowego.

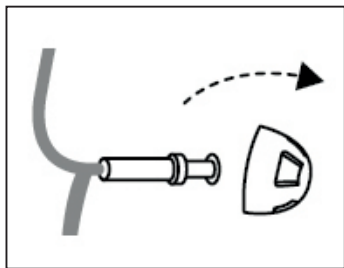

1. Następnie pociągnij kopułkę za żebrowany koniec, aby ją odłączyć.

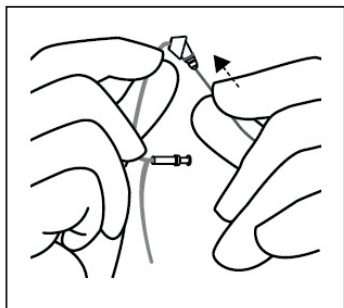


2. Teraz wprowadź drucik do czyszczenia przez górny koniec cienkiego dźwiękowodu, który przed chwilą był podłączony do aparatu słuchowego. Przeprowadź drucik do czyszczenia do końca, aby w pełni usunąć wszelkie zabrudzenia.

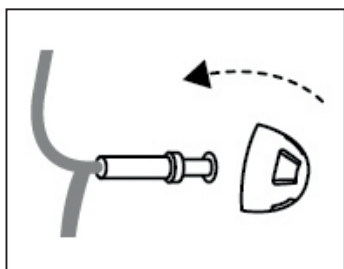


3. Teraz załóż kopułkę ponownie na cienki dźwiękowód.

Czyszczenie i wymiana cienkich dźwiękowodów danalogic Extend (ciąg dalszy)

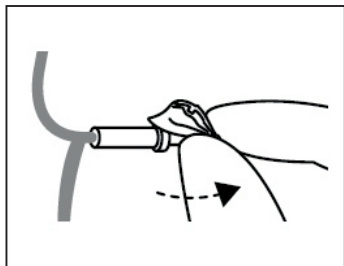

4. Upewnij się, że kopułka nie spada, ostrożnie unosząc dolną część kopułka i sprawdzając, czy kołnierz całkowicie przykrywa żebrowany koniec cienkiego dźwiękowodu.

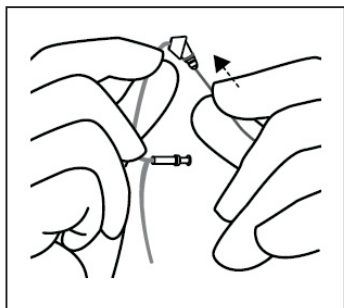

5. Na koniec zatrzaśnij cienki dźwiękowód ponownie na aparacie słuchowym.

Wymiana

Aby wymienić cienki dźwiękowód ściągnij cały dźwiękowód z aparatu słuchowego i załóż nowy. O prawidłowym montażu świadczy kliknięcie. Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby upewnić się, że nowa kopułka jest idealnie dopasowana do nowego cienkiego dźwiękowodu.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub wejdź na portal wsparcia pacjenta: danalogic.co.uk/patient-portal