


Obsługa funkcji zestawu głośnomówiącego produktu danalogic Extend zgodnej z telefonami iPhone i urządzeniami iPad

Aby upewnić się, że Twoje urządzenie jest zgodne, wejdź na stronę internetową www.danalogic.co.uk/connectivity

Funkcja	Obsługa
Odbieranie połączeń	Naciśnij przycisk aparatu słuchowego lub przeciągnij, aby odebrać połączenie przychodzące na telefonie iPhone/iPadzie.
Kończenie połączeń	Naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu słuchowego przez kilka sekund, aby zakończyć połączenie. Ewentualnie zakończ połączenie, dotykając czerwonego przycisku na ekranie.
Drugie połączenie przychodzące	Jeśli ktoś spróbuje się z Tobą skontaktować, gdy prowadzisz już rozmowę telefoniczną, możesz odrzucić połączenie, naciskając i przytrzymując przycisk aparatu słuchowego, ewentualnie dotykając opcji „Odrzuć” na ekranie telefonu iPhone lub iPada.
Regulacja głośności	Do obsługi funkcji służą przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na telefonie iPhone lub iPadzie
Wyłączanie zestawu	Trzykrotnie kliknij przycisk push telefonu iPhone, aby uzyskać dostęp do ustawień aparatu słuchowego w systemie iOS (dostęp jest możliwy także z centrum sterowania). Wybierz opcję „Opcje wprowadzania”, a następnie opcję „Wyl.”.

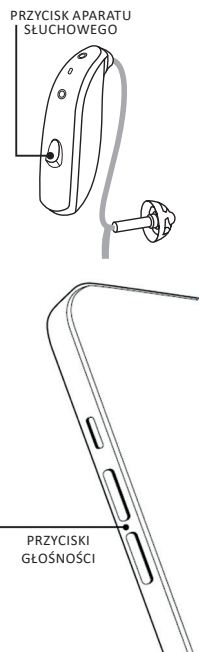

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub wejdź na portal wsparcia pacjenta: danalogic.co.uk/patient-portal

Właściwy wybór dla NHS

danalogic GN