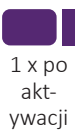
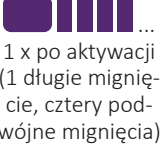
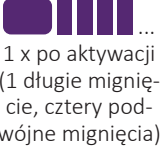


Ustawienia oświetlenia LED danalogic Extend BTE

	Funkcja oprogramowania	Włączanie	Wyłączanie	Podłączenie do ładowarki		Rozładowana bateria
				Ładowanie	Pełna bateria	
Ustawienia wskaźnika LED	Wyt.			 ...	 ...	 ...
	Jedno mignięcie			 ...	 ...	 ...
	Ciągłe miganie			 ...	 ...	 ...

	Funkcja oprogramowania	Zmiana głośności	Limit głośności	Status programu	DAI	Tryb samolotowy
Ustawienia wskaźnika LED	Wyt.	 Brak podświetlenia	 Brak podświetlenia	 Brak podświetlenia	 Brak podświetlenia	 Brak podświetlenia
	Jedno mignięcie	 1 x po naciśnięciu	 1 x po osiągnięciu	 Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 1 x po naciśnięciu	 1 x po aktywacji	 ... 1 x po aktywacji (1 długie mignięcie, cztery podwójne mignięcia)
	Ciągłe miganie	 1 x po naciśnięciu	 1 x po osiągnięciu	 Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 1 x po naciśnięciu	 1 x po aktywacji	 ... 1 x po aktywacji (1 długie mignięcie, cztery podwójne mignięcia)

Uwagi:

- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii ma najwyższy priorytet wśród wskaźników.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub wejdź na portal wsparcia pacjenta: danalogic.co.uk/patient-portal

Właściwy wybór dla NHS

danalogic GN