


# Ogólne porady dotyczące czyszczenia i konserwacji

Oto przydatne wskazówki, które pomogą Ci utrzymać aparaty słuchowe danalogic w najlepszym możliwym stanie:

- Regularnie czyść aparaty słuchowe i chroń je przed wilgocią. Przed czyszczeniem umyj i dokładnie wysusz ręce, a do usuwania tłuszczu lub wilgoci używaj miękkiej ściereczki bądź chusteczki.
- Nie czyść aparatów słuchowych wodą ani rozpuszczalnikami, a także nie zanurzaj ich w innych płynach.
- Nie upuszczaj aparatów słuchowych na twarde powierzchnie.
- Nie pozostawiaj aparatów słuchowych na słońcu ani w obszarach bezpośrednio wystawionych na jego działanie, np. latem w samochodzie zaparkowanym bez zadaszenia, gdyż zbyt wysoka temperatura może uszkodzić obudowę.
- Nie noś aparatów słuchowych pod prysznicem, w kąpeli, na zewnątrz w czasie ulewnego deszczu ani w wilgotnych miejscach, np. w saunie.
- Wyjmuj aparaty słuchowe, zanim skorzystasz z kosmetyków, perfum, płynu po goleniu, sprayu do włosów czy balsamu, gdyż takie produkty mogą je uszkodzić.
- Dodatkowo sprawdzaj cienki dźwiękowód, kopułkę, rurki i wkładkę uszną pod kątem oczywistych zatorów oraz odpowiednio czyść komponenty.

U góry / na kręgosłupie aparatu słuchowego znajdują się dwa wloty mikrofonów (po obu stronach górnego przycisku push). Każdy mikrofon jest zabezpieczony filtrem przepuszczającym dźwięk, który może się zatkać kurzem i innymi zabrudzeniami.

Co drugi dzień czyść każdy wlot mikrofonu szczoteczką do czyszczenia aparatu słuchowego.

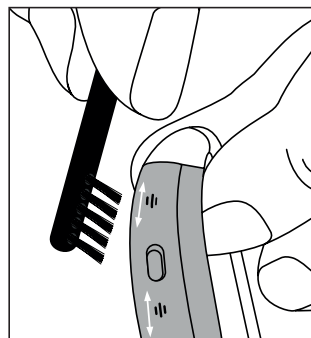

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub wejdź na portal wsparcia pacjenta: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

Właściwy wybór dla NHS

danalogic GN