



Чистка и замена тонких звуководов для danalogic Extend

Чистка


Для начала протрите тонкий звуковод и колпачок влажной тканью. Если звуковод забился воском или другими загрязнениями, извлеките его из слухового аппарата, осторожно потянув весь звуковод на себя.

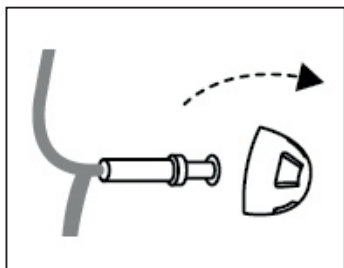

1. Затем снимите колпачок, потянув его за ребристый конец.

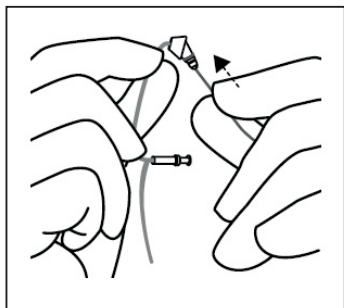


2. Вставьте чистящий стержень через верх тонкого звуковод в том месте, где он соединяется со слуховым аппаратом. Вставьте чистящий стержень до конца, чтобы полностью удалить загрязнения.

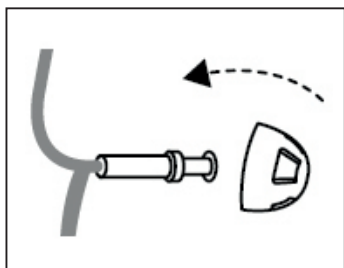


3. Теперь вставьте колпачок обратно на звуковод.

Чистка и замена тонких звуководов для danalogic Extend (продолжение)

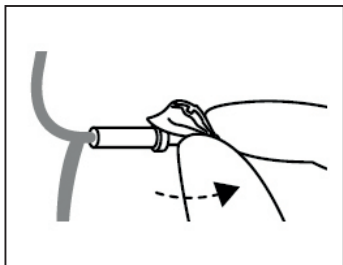

4. Проверьте надежность крепления колпачка, осторожно приподняв его нижнюю часть и убедившись, что зажимное кольцо полностью закрывает ребристый конец тонкого звуковода.

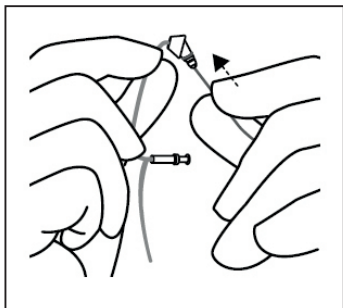

5. Наконец, вставьте звуковод обратно в слуховой аппарат, пока он не зафиксируется на месте.

Замена

Если нужно заменить тонкий звуковод, снимите его со слухового аппарата и замените новым, убедившись, что он плотно зафиксирован. Чтобы убедиться, что новый колпачок правильно установлен на новом тонком звуководе, следуйте инструкциям выше.



Для получения дополнительной поддержки отсканируйте QR-код или посетите наш портал поддержки пациентов:
danalogic.co.uk/patient-portal