


Общие советы по чистке и обслуживанию

Здесь приведены несколько полезных советов, которые помогут сохранить ваш слуховой аппарат Danalogic в наилучшем состоянии.

- Следите, чтобы слуховой аппарат оставался чистым и сухим. Для удаления жира или влаги можно использовать мягкую ткань или салфетку, при этом убедитесь, что ваши руки чистые и сухие.
- Не используйте воду или растворители для чистки слуховых аппаратов; не погружайте их в воду или другие жидкости.
- Избегайте падения слухового аппарата на твердые поверхности.
- Не оставляйте слуховой аппарат под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи них, например, в припаркованном автомобиле. Чрезмерное нагревание может привести к повреждению корпуса.
- Не носите аппарат во время душа, плавания, под проливным дождем или во влажной атмосфере, например, в сауне.
- Снимайте слуховой аппарат при нанесении косметики, духов, лосьона после бритья, лака для волос или лосьона, так как они могут повредить слуховой аппарат.
- Кроме того, проверьте на наличие явных загрязнений тонкий звуковод, колпачок, трубки, ушные вкладыши и очистите их соответствующим образом.

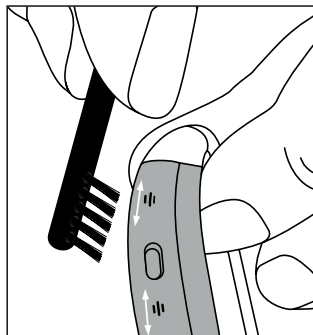

На верхней части слухового аппарата расположены два микрофонных отверстия. (По обе стороны от верхней кнопки.) Микрофоны защищены звукопроницаемым фильтром, но, как и любой фильтр, они могут забиваться пылью и мусором.

С помощью щетки для чистки слухового аппарата очищайте каждое микрофонное отверстие раз в два дня.



Для получения дополнительной поддержки отсканируйте QR-код или посетите наш портал поддержки пациентов:
danalogic.co.uk/patient-portal