



Limpieza y sustitución de tubos finos para danalogic Extend

Limpieza


En primer lugar, puede limpiar el tubo fino y el domo con un paño húmedo. Si el tubo fino está obstruido con cera u otros residuos, retírelo del audífono tirando con cuidado de todo el tubo para sacarlo del audífono.

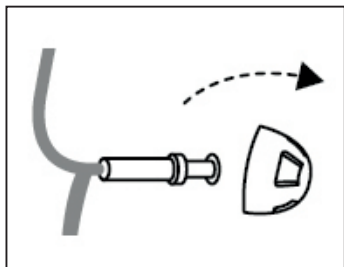

1. A continuación, extraiga el domo tirando de él desde el extremo estriado.

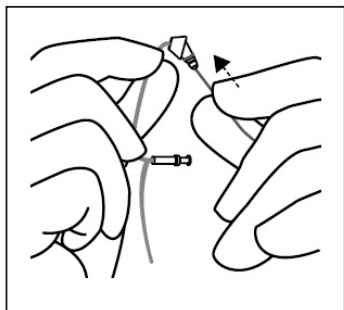


2. A continuación, introduzca el cable de limpieza por la parte superior del tubo fino, donde se conecta al audífono. Pase el cable de limpieza completamente para eliminar todos los residuos.

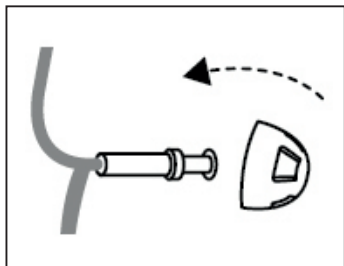


3. Vuelva a colocar el domo en el tubo fino.

Limpieza y sustitución de tubos finos para danalogic Extend (continuación)

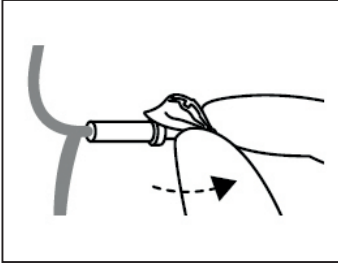

4. Compruebe que el domo está bien sujeto levantando con cuidado la parte inferior del mismo y comprobando que el collarín cubre completamente el extremo estriado del tubo fino.

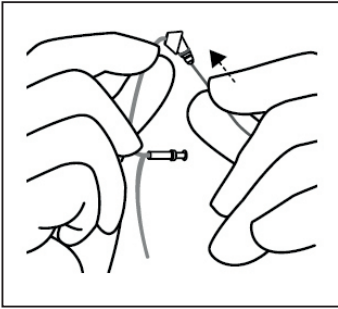

5. Por último, vuelva a colocar el tubo fino en el audífono hasta que encaje firmemente en su sitio.

Sustitución

Si necesita sustituir el tubo fino, extraiga todo el tubo de los audífonos y sustitúyalo por uno nuevo, asegurándose de que encaje firmemente en su sitio. Siga las instrucciones anteriores para asegurarse de que el nuevo domo se ajusta correctamente al nuevo tubo fino.



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: danalogic.es/patient-portal