


# Cómo disfrutar de llamadas con manos libres para iPhone y iPad con Danalogic Extend

Asegúrese de que su dispositivo es compatible consultando nuestro sitio web aquí [www.danalogic.co.uk/connectivity](http://www.danalogic.co.uk/connectivity)

Función	Cómo
Responder a una llamada	Pulse brevemente el botón de su audífono o deslice para responder en el iPhone/iPad
Finalizar una llamada	Mantenga pulsado el botón del audífono durante unos segundos para finalizar la llamada. También puede colgar pulsando el botón rojo de la pantalla.
Segundas llamadas entrantes	Si está en una llamada y recibe otra, puede rechazarla pulsando prolongadamente el botón del audífono o pulsando «Rechazar» en la pantalla del iPhone o iPad.
Cambiar el volumen	Utilice los botones para subir y bajar el volumen del iPhone o iPad.
Desactive las llamadas con manos libres en los ajustes del audífono iOS	Haga triple clic en el pulsador del iPhone para acceder a los ajustes del audífono de iOS (también puede acceder a través del Centro de control). Seleccione «Opciones de entrada» y, a continuación, «Desactivado».

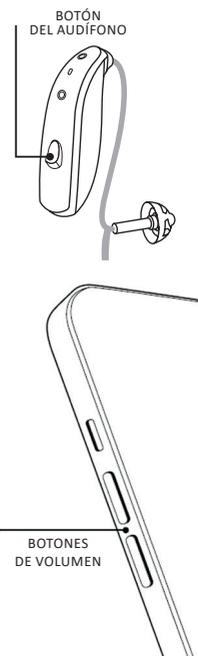

Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: [danalogic.es/patient-portal](http://danalogic.es/patient-portal)