


# Consejos generales de limpieza y mantenimiento

Estos son algunos consejos prácticos para mantener sus audífonos Danalogic en las mejores condiciones posibles:

- Mantenga los audífonos limpios y secos. Puede utilizar un paño suave o un pañuelo de papel para eliminar la grasa o la humedad y asegúrese de tener las manos limpias y secas.
- No utilice agua ni disolventes para limpiar los audífonos, ni los sumerja en agua u otros líquidos.
- Evite que los audífonos se caigan sobre superficies duras.
- No deje los audífonos bajo la luz directa del sol o cerca de ella, como en un coche aparcado y caliente, ya que el calor excesivo puede dañar la carcasa.
- No los lleve puestos mientras se ducha, nada, llueve fuerte o está en un ambiente húmedo, como una sauna
- Quítese los audífonos cuando se aplique cosméticos, perfume, loción para después del afeitado, laca o loción para el pelo, ya que pueden dañarlos
- Además, compruebe si el tubo fino, el domo, el tubo o el molde auricular presentan obstrucciones evidentes y límpielos adecuadamente

En la parte superior del audífono hay dos entradas de micrófono. (A ambos lados del pulsador superior). Los micrófonos están protegidos por un filtro transparente al sonido, pero, como cualquier filtro, pueden obstruirse con polvo y suciedad.

Utilice un cepillo de limpieza de audífonos para cepillar cada entrada de micrófono cada dos días.

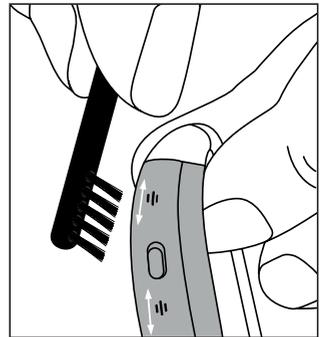

Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)