



Чищення та заміна тонких звуководів для danalogic Extend

Чищення


Спочатку ви можете протерти тонкий звуковід та купол вологою тканиною. Якщо тонкий звуковід забруднений сіркою чи іншим брудом, видалить його зі слухового апарата, обережно витягнувши всю трубку зі слухового апарата.

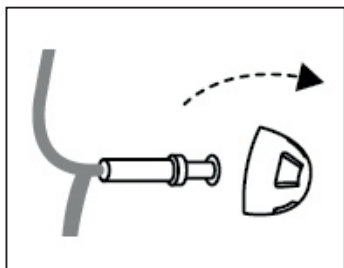

1. Потім витягніть купол, потягнувши його з ребристого кінця.

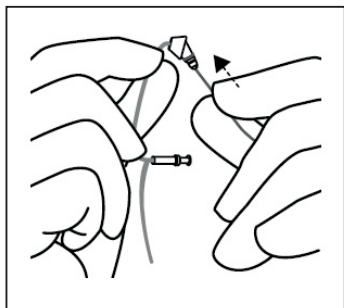


2. Тепер прошовхніть дротовий очищувач через верхню частину звуководу, де він з'єднується зі слуховим апаратом. Повністю протягніть дротовий очищувач, щоб видалити все забруднення.

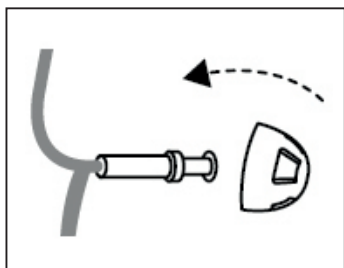


3. Тепер натягніть купол знову на звуковід.

Чищення та заміна тонких звуководів для danalogic Extend (продовження)

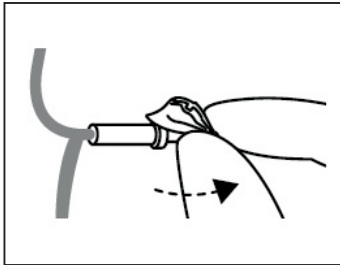

4. Перевірте надійність фіксації купола, обережно піднявши нижню частину купола та переконавшись, що манжета повністю покриває ребристий кінець звуководу.

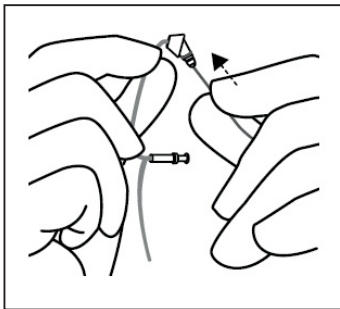

5. Нарешті, проштовхніть звуковід назад на слуховий апарат, доки він не встане на місце.

Заміна

Якщо треба замінити звуковід, витягніть всю трубку зі слухового апарата та замініть його новою, яка має надійно встати на місце. Дотримуйтеся інструкцій вище, щоб новий купол був правильно встановлений на вашому новому звуководі.



Для додаткової допомоги відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів: **danalogic.co.uk/patient-portal**