


Як використовувати функцію «хендс-фрі» на iPhone та iPad з Danalogic Extend

Переконайтеся, що пристрій є сумісним, на нашому сайті:

www.danalogic.co.uk/connectivity

Функція	Дії
Відповідь на виклик	Коротке натискання кнопки на слуховому апараті або проведення пальцем на iPhone/iPad
Завершення виклику	Натисніть та утримуйте кнопку слухового апарата протягом кількох секунд, щоб завершити виклик. Також можна завершити, торкнувшись червоної кнопки на екрані
Другий вхідний виклик	Якщо ви відповіли на виклик і отримуєте другий виклик, ви можете відхилити його за допомогою довгого натискання на кнопку слухового апарата або торкнувшись «Відхилити» на екрані iPhone або iPad
Зміна гучності	Використовуйте кнопки гучності на iPhone або iPad
Вимикання функції «хендс-фрі» в налаштуваннях слухового апарата в iOS	Тричі натисніть кнопку iPhone, щоб перейти до налаштувань слухового апарата в iOS (ви також можете отримати доступ через Центр керування). Оберіть «Вхід», потім «Вимк».

КНОПКА СЛУХОВОГО АПАРАТА

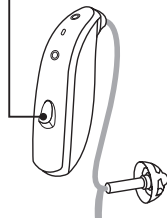

Для додаткової допомоги відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів: **danalogic.co.uk/patient-portal**